



diasend® Uploader

Instructions d'utilisation – utilisateurs de diasend®

Table des matières

Recherchez votre dispositif	4-5
Comment commencer à utiliser diasend® Personal	6
Ouvrez une session ou commencez un nouveau compte sur www.diasend.com	6
Téléchargez le logiciel diasend® Uploader	6
Sauvegardez le fichier d'installation	7
Localisez le fichier d'installation et exécutez le fichier	7
Démarrez diasend® Uploader	7
Connectez le câble du dispositif de suivi de diabète à l'ordinateur	8
Connectez le dispositif de suivi de diabète au câble	8
Téléchargez des données de votre dispositif de suivi de diabète	9
Ouvrez une session sur www.diasend.com pour afficher vos données	9
Partagez vos données avec une clinique	9
Visionnez vos données téléchargées dans diasend® Mobile app	10
Comment connecter l'application mobile à partir de votre appareil avec diasend®	11
Liste des dispositifs compatibles.....	13

Recherchez votre dispositif



Abbott

	FreeStyle	13
	FreeStyle Flash.....	13
	FreeStyle Freedom	13
	FreeStyle Freedom Lite	13
	FreeStyle InsuLinx	13
	FreeStyle Lite.....	13
	FreeStyle Mini.....	13
	FreeStyle Optium	13
	FreeStyle Optium H.....	13
	FreeStyle Optium Neo	13
	FreeStyle Papillon	13
	FreeStyle Papillon InsuLinx	13
	FreeStyle Papillon Lite.....	13
	FreeStyle Papillon Mini.....	13
	FreeStyle Papillon Vision	13
	FreeStyle Precision	13
	FreeStyle Precision H.....	13
	FreeStyle Xido	13
	Optium Mini.....	13
	Optium Xceed	13
	Optium Xido	13
	Precision Xceed	13
	Precision Xtra.....	13
	FreeStyle Libre	13
	FreeStyle Libre 2	13
	FreeStyle Navigator II.....	13

Acon Laboratories

	On Call® Express	13
	On Call® Express II	13
	On Call® Express Voice	13
	On Call® Sure.....	13
	On Call® Sure Sync.....	13

Agamatrix

	Wavesense Jazz	13
--	----------------------	----

Animas

	IR1200.....	21
	IR1250.....	21
	2020	21
	OneTouch Ping	21
	Vibe	21

AktivMed

	Glucocheck Gold TD-4289	13
	Glucocheck XL TD-4277	13

Arkray

	GlucoCard 01	14
	GlucoCard Expression	14
	GlucoCard Shine	14
	GlucoCard Shine Connex.....	14
	GlucoCard Shine Express.....	14
	GlucoCard Shine XL	14
	GlucoCard Vital.....	14
	ReliOn Confirm	14
	ReliOn Premier Blu.....	14
	ReliOn Premier Classic.....	14
	ReliOn Premier Voice.....	14
	ReliOn Prime	14

Ascensia/Bayer

	Bayer Contour next.....	14
	Breeze2.....	14
	Contour	14
	Contour care	14
	Contour Fit	14
	Contour link	14
	Contour next	14
	Contour next link.....	14
	Contour next link 2.4	14
	Contour next One.....	14
	Contour next USB.....	14
	Contour plus	14
	Contour plus One.....	14
	Contour TS.....	14
	Contour USB	14
	Contour XT.....	14

B. Braun

	Omnitest 3	14
	Omnitest 5	14

Beurer

	GL50 evo	14
---	----------------	----

CARE-CHEK

	TD-4206.....	15
	TD-4255.....	15

Dario

	myDario.....	11
---	--------------	----

Ekoweb

	GlucosX (TD-4183).....	15
	GlucosX Pro (TD-4183)	15

Dexcom

	G4 Platinum	15
	G5 Mobile.....	11
	G5 Receiver.....	15
	SEVEN PLUS	15
	Touchscreen Receiver (G5/G6) ...	15

Equil/Wellion

	MICRO-pump	27
---	------------------	----

FaCare

	TD-4277	15
---	---------------	----

ForaCare

	FORA Diamond Prima	15
---	--------------------------	----

GlucosX

	Nexus	15
	Nexus mini.....	15
	Nexus mini Ultra	15
	Nexus Voice	15
	Q	15

GlucosX

	TD-4183.....	15
	TD-4257.....	15
	TD-4285.....	15

i-SENS

	alphacheck professional	16
	COOL/Bravo	16
	CareSens Dual.....	16
	CareSens N	16
	CareSens N POP	16
	CareSens N Premier.....	16
	CareSens N Voice	16
	CareSens Pro.....	16
	CareSens N POP	16
	NoCoding1 Plus BLE.....	16
	Tee2 Plus.....	16

Insulet	
 Omnipod® System	20
 Omnipod® DASH™ System	20

Intuity	
 POGO® Automatic™	16

LifeScan - OneTouch	
 Ping	16
Select Plus	16
Select Plus Flex	16
Ultra	16
Ultra2	16
UltraEasy	16
UltraMini	16
UltraSmart	16
Ultra Plus Reflect	16
Verio	16
Verio (old)	16
Verio Flex	16
Verio IQ	16
Verio Pro	16
Verio Reflect	16
VerioSync	16
Vita	16

Lifesmart	
 LS-946 (TD-4279)	16

MedCore	
 Care	16

Medtrum	
 A6 TouchCare® System	11

Menarini	
 GlucoMen areo	17
GlucoMen areo 2K	17
GlucoMen Gm	17
GlucoMen LX2	17
GlucoMen LX Plus	17

Menarini	
 GlucoMen Day CGM	17

Nipro	
 4SURE Smart	17
TRUE METRIX	17
TRUE METRIX AIR	17
TRUEresult	17
TRUEyou	17
TRUEyou mini	17

Prodigy	
 AutoCode	17

Roche - Accu-Chek	
 Active	17
Aviva	19
Aviva Connect	17
Aviva Combo	19
Aviva Expert	19
Aviva Nano	19
Compact Plus	19
Guide	17
Guide Me	17
Instant	17
Mobile (IR)	19
Mobile (USB)	17
Performa Connect	17

 Insight	22
 Solo	20
Spirit	22
Spirit Combo	22

Sanofi	
 BGStar	17
MyStar Extra	17

Senseonics	
 CGM Transmitter	17

Taidoc	
 TD-4183	15
TD-4141	15
TD-4206	15
TD-4255	15
TD-4257(v1)	15
TD-4257(v2)	15
TD-4277	15
TD-4279	15
TD-4280	15
TD-4285	15
TD-4289	15

Tandem	
 t:flex	20
t:slim	20
t:slim G4	20
t:slim X2	20

URIGHT	
 TD-4255	18
TD-4277, PLUS One (TD-4277)	18
TD-4280	18

ViCentra	
 Kaleido	20

VTRUST	
 TD-4279	18

Wellion	
 Calla Mini	18

XPER Technology	
 E1 (TD-4141)	18
A1 (TD-4183)	18
Procheck Advance (TD-4206)	18
I1 (TD-4289)	18

Ypsomed	
 mylife Pura	18
mylife Unio	18

 mylife Omnipod	20
mylife YpsoPump	11

À propos de diasend®

diasend® Personal est un service entièrement gratuit pour les patients souffrant du diabète et qui souhaitent surveiller leur taux de glycémie, leurs valeurs CGM et leur taux d'insuline à domicile.

Pour pouvoir télécharger vos données à partir de votre/vos dispositif(s) de suivi de diabète, vous devez d'abord créer un compte et télécharger le logiciel diasend® Uploader.


Usage prévu

diasend® est destiné à être utilisé par des individus ou des professionnels de santé à domicile ou dans des établissements de soins de santé pour la transmission de données entre des dispositifs de surveillance à domicile tels que des glucomètres et pompes à insuline, et la base de données d'un serveur pour aider la gestion d'un diabète. diasend® est destiné à un usage professionnel et à la vente libre.

Comment commencer à utiliser diasend® Personal

1

Ouvrez une session ou commencez un nouveau compte sur www.diasend.com

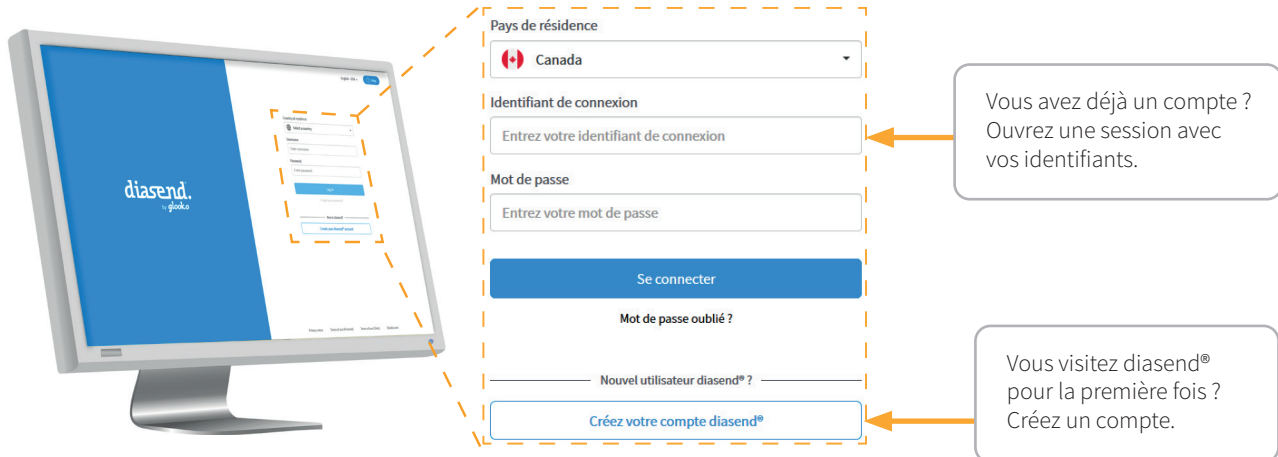

Pays de résidence
Canada

Identifiant de connexion
Entrez votre identifiant de connexion

Mot de passe
Entrez votre mot de passe

Se connecter

Mot de passe oublié ?

Nouvel utilisateur diasend® ?


Créez votre compte diasend®

Vous avez déjà un compte ?
Ouvrez une session avec vos identifiants.

Vous visitez diasend® pour la première fois ?
Créez un compte.

2

Téléchargez le logiciel diasend® Uploader

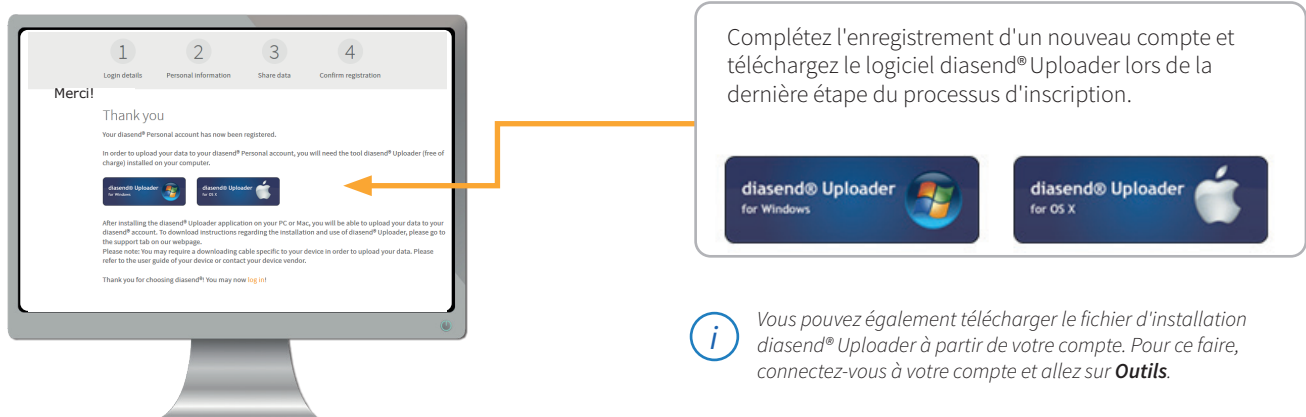

1 Login details 2 Personal information 3 Share data 4 Confirm registration

Merci!

Thank you

Your diasend® Personal account has now been registered.

In order to upload your data to your diasend® Personal account, you will need the tool diasend® Uploader (free of charge) installed on your computer.

diasend® Uploader for Windows diasend® Uploader for OS X

After installing the diasend® Uploader application on your PC or Mac, you will be able to upload your data to your diasend® account. To download instructions regarding the installation and use of diasend® Uploader, please go to the support tab on our webpage.

Please note: You may require a downloading cable specific to your device in order to upload your data. Please refer to the user guide of your device or contact your device vendor.


Thank you for choosing diasend®. You may now [log in!](#)

Complétez l'enregistrement d'un nouveau compte et téléchargez le logiciel diasend® Uploader lors de la dernière étape du processus d'inscription.

diasend® Uploader for Windows diasend® Uploader for OS X

i Vous pouvez également télécharger le fichier d'installation diasend® Uploader à partir de votre compte. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte et allez sur **Outils**.

3 Sauvegardez le fichier d'installation

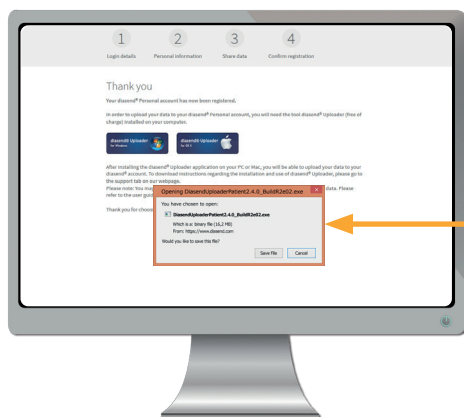

You have chosen to open:

DiasendUploaderPatient2.4.0_BuildR2e02.exe

Which is a: binary file (16,2 MB)

From: <https://www.diasend.com>

Would you like to save this file?

Save File

Cancel




Systèmes d'exploitation compatibles :

Windows 8 et 10.

macOS X 10.14–11.0

4 Localisez le fichier d'installation et exécutez le fichier

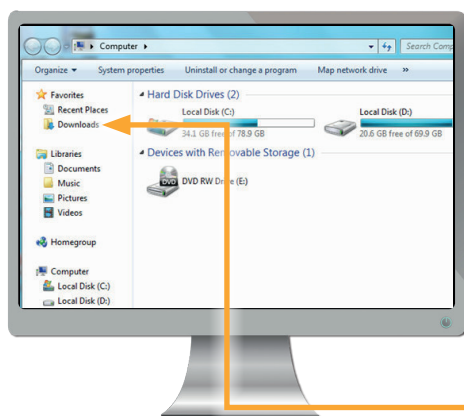


En fonction de votre navigateur Web, vous pourriez avoir besoin de rechercher le fichier d'installation téléchargé. Ou bien, une fenêtre contextuelle vous invitera à exécuter le fichier.

Utilisateur PC : Regardez dans votre dossier de téléchargements récents.

Utilisateur Mac : Regardez dans le dossier de téléchargements dans Finder.

Une fois que vous avez trouvé le fichier, double-cliquez dessus et suivez les instructions d'installation à l'écran.

5 Démarrez diasend® Uploader

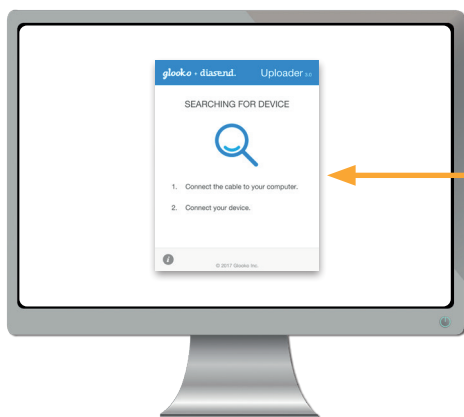


Double-cliquez sur l'icône diasend® Uploader qui figure sur votre bureau pour démarrer le programme.



Assurez-vous que vous avez redémarré votre ordinateur avant de lancer diasend® Uploader pour la première fois.


6 Connectez le câble du dispositif de suivi de diabète à l'ordinateur

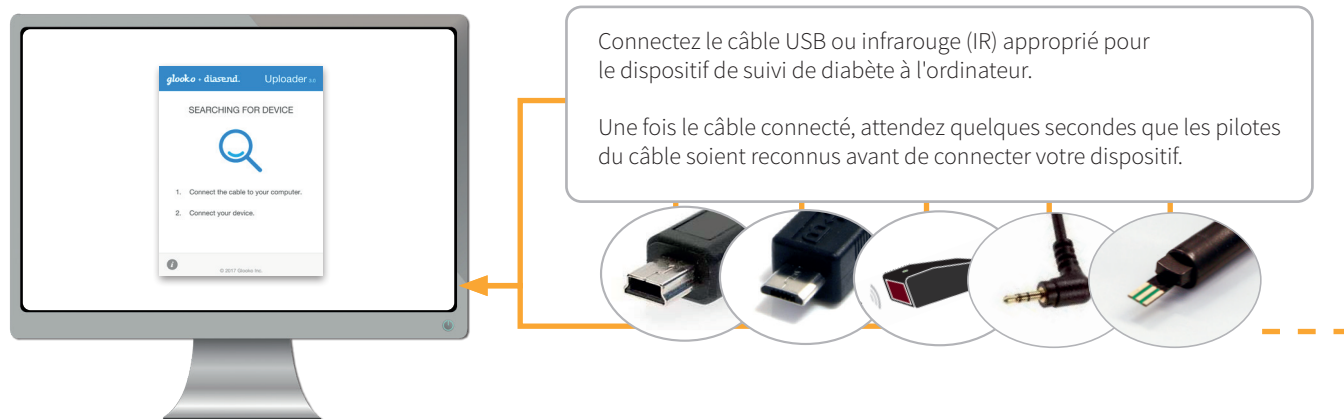

i Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec votre dispositif de suivi de diabète.

i **Câble manquant ?**
Veuillez communiquer avec le fabricant de votre dispositif de suivi de diabète spécifique.

7 Connectez le dispositif de suivi de diabète au câble

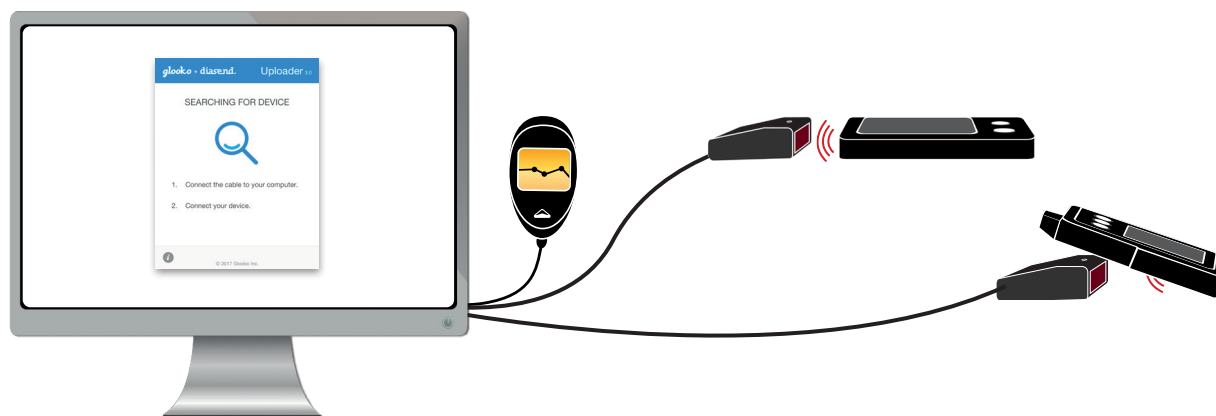

8 Téléchargez des données de votre dispositif de suivi de diabète



Lors du premier téléchargement de données à partir de votre dispositif, vous devrez peut-être valider votre compte utilisateur. Veuillez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe afin de pouvoir compléter le téléchargement et attribuer le dispositif à votre compte.

i Les pompes Animas® et les glucomètres Roche Accu-Chek® nécessitent un adaptateur câblé IR pour téléchargement sans fil Actisys (ACT-IR224UN-Li). Les patients Animas® disposant de Windows 8 et 10 auront besoin d'un câble spécifique (ACT-IR224UN-Li2).

Le câble USB Accu-Chek® 360 est également compatible avec les dispositifs IR Accu-Chek®. Tous les autres appareils nécessitent leur propre câble USB.

9 Ouvrez une session sur www.diasend.com pour afficher vos données




Toutes vos données sont affichées dans des tableaux et des graphiques faciles à comprendre. Veuillez consulter le **Guide de référence pour les rapports** sur notre site Web pour plus d'informations.

Les rapports sont répartis dans les onglets suivants :

Glucémie SGC Insuline Comparaison Compilation

10 Partagez vos données avec une clinique

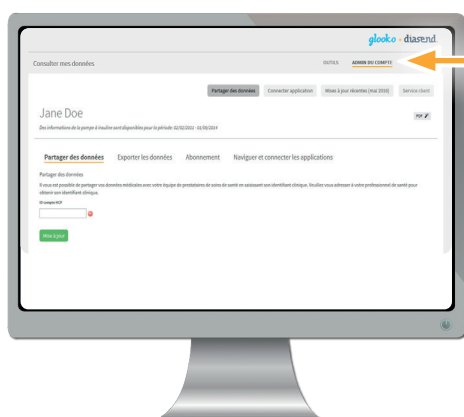

Il vous est possible de partager vos données avec votre prestataire de soins de santé en saisissant leur identifiant de clinique sous les onglets **Admin du compte** et **Partager des données**. N'oubliez pas de cliquer sur **Mise à jour**.

ADMIN DU COMPTE


ID compte HCP

Partager des données

Mise à jour

11

Visionnez vos données téléchargées dans diasend® Mobile app

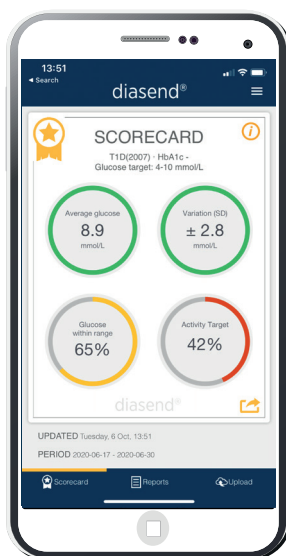

Téléchargez l'application depuis Google Play ou App Store.



Ouvrez une session avec vos identifiants diasend® Personal ou créez un nouveau compte.



Les avantages de diasend® Mobile app incluent :

- Un bon résumé des dernières données téléchargées.
- Des rapports faciles à comprendre sur votre apport en insuline et vos niveaux de glucose observés dans le temps.
- La possibilité de télécharger des données directement avec votre téléphone intelligent - si le dispositif de suivi de diabète et votre téléphone prennent en charge la technologie CCP (communication en champ proche) ou BLE (Bluetooth à faible puissance).
- Le complément parfait pour votre diasend® Personal account à www.diasend.com.

12

Comment connecter l'application mobile à partir de votre appareil avec diasend®

- Synchronisez vos données liées au diabète de façon transparente avec votre compte diasend®

Cette connexion est réalisable avec les applications suivantes :

- Dexcom G5/G6 (Actuellement disponible uniquement en dehors des États-Unis)
- LibreLink (Limité par Abbott à la Suède et à la Norvège)
- Eversense (Actuellement disponible uniquement en dehors des États-Unis)
- Medtrum Easy Touch (A6 TouchCare® System)
- mylife™ App (mylife™ YpsoPump®)
- myDario
- GlucoMen Day CGM

Systèmes requis :

- Un compte diasend® Personal – GRATUIT pour les patients !
- un téléphone intelligent Android ou un iPhone.



A Ouvrez une session dans votre compte diasend® Personal et cliquez sur le bouton **Connecter application**.

Connecter application

Partager des données | **Connecter application** | Mises à jour récentes (sept. 2018) | Service client

Jane Doe PDF

Partager des données | Exporter les données | Abonnement | **Naviguer et connecter les applications**

IMPORTANT : vos données peuvent n'apparaître dans vos rapports diasend® que quelques heures après votre connexion, voire le matin suivant; selon le suiveur d'activité utilisé, les nouvelles données recueillies, lorsque disponibles, sont ensuite transférées automatiquement au moins une fois par jour dans diasend®.



Fitbit
Fitbit offers wearable devices to help you lead a healthier, more active life.
[Connexion](#)



Runkeeper
The Runkeeper app is a personal trainer in your pocket.
[Connexion](#)



Dexcom (G5 Mobile / G6 app)
Le système Dexcom utilise un capteur et une application pour suivre votre taux de glycémie en continu et vous permettre de mieux gérer votre diabète.
[Connexion](#)



Abbott FreeStyle LibreLink
The FreeStyle Libre sensor is read via the FreeStyle LibreLink app on your Android smartphone or iPhone. Connecting your LibreView account to your diasend® account means that your data will continuously sync with diasend®.
[Connexion](#)



Medtrum
A6 TouchCare® combine un timbre transdermique et un CGM pour communiquer avec le PDM, puis avec l'application EasyTouch (ou EasySense si vous utilisez un CGM autonome) sur les téléphones intelligents iOS ou Android. Une fois que vous aurez connecté votre compte EasyTouch/EasySense à diasend®, les données seront transférées en continu et automatiquement sur votre compte.
[Connexion](#)



mylife™ App / mylife™ Cloud
Connectez-vous avec vos identifiants mylife™ Cloud et connectez-le à votre compte diasend®. Vos données thérapeutiques seront synchronisées en tout temps, peu importe que vous ayez enregistré vos données par le biais de l'application mylife™ ou en utilisant le logiciel mylife™.
[Connexion](#)



Eversense
L'application mobile Eversense fonctionne de paire avec le système Eversense Continuous Glucose Monitoring (CGM). L'application mobile permet d'accéder facilement aux données du CGM sans avoir besoin d'un récepteur dédié.
[Connexion](#)

B Cliquez sur le lien de connexion selon votre application.

Connexion

Your Account
Sign in to manage your account.

Username *

Password *

Login

[Forgot your username or password?](#)

C Ouvrez une session avec vos **nom d'utilisateur** et **mot de passe** afin d'autoriser l'ajout de l'application de votre choix à votre compte diasend® Personal.

À partir de maintenant, les données de votre téléphone vont **apparaître** dans votre compte diasend® Personal et pourront facilement être **partagées** avec votre clinique.

Veuillez remarquer

LibreLink


Si vous n'avez pas de téléphone Android ou iPhone, vous pouvez télécharger les données sur diasend® par le biais de votre lecteur FreeStyle Libre. Pour ce faire, utilisez simplement le logiciel diasend® Uploader sur votre ordinateur et connectez le lecteur FreeStyle Libre avec un câble micro USB à votre ordinateur. Si vous avez d'autres appareils rattachés à votre compte diasend®, les données de votre FreeStyle Libre apparaîtront avec les informations de vos appareils additionnels. LibreLink est une application mobile, développée et mise à disposition par Abbott. L'utilisation de LibreLink nécessite un enregistrement avec LibreView, un service mis à disposition par Abbott. L'application LibreLink est compatible avec les smartphones équipés de la fonction NFC sous Android OS 5.0, ou iPhone 7 avec iOS 11 – ou plus. Toutes les marques déposées dans cette brochure sont la propriété de leur détenteur.

Eversense

Si vous avez d'autres appareils rattachés à votre compte diasend®, les données de votre Eversense apparaîtront avec les informations de vos appareils additionnels.

Liste des dispositifs compatibles

Les dispositifs compatibles avec diasend® sont répertoriés ci-dessous. À moins que des instructions explicites soient fournies pour le dispositif en question, il vous suffit de le connecter à votre PC/Mac à l'aide de son câble USB spécifique et le téléchargement se fera automatiquement. (Allez sur support.diasend.com pour voir une liste des dispositifs compatibles et les limitations connues.)

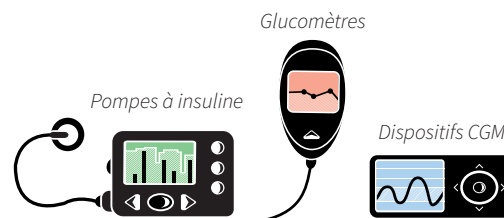

Notez que certains des dispositifs de suivi du diabète suivants peuvent ne pas être disponibles sur votre marché.

Glucomètres et CGM - connectés avec un câble

Abbott

FreeStyle
FreeStyle Flash
FreeStyle Freedom
FreeStyle Freedom Lite
FreeStyle Lite
FreeStyle Mini
FreeStyle Optium

FreeStyle Optium H
FreeStyle Papillon
FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Papillon Vision
FreeStyle Xido
Optium Mini



Abbott FreeStyle USB
(2,5 mm)

FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Libre*
FreeStyle Libre 2*

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx

Micro USB



*Limité par Abbott à la Suède et à la Norvège.

FreeStyle Navigator II

Mini USB



FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed

Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra

Abbott Xceed USB



AktivMed

Glucocheck Gold TD-4289

Micro USB



Glucocheck XL TD-4277

Mini USB



Acon Laboratories

On Call® Express
On Call® Express II
On Call® Express Voice

On Call® Sure
On Call® Sure Sync

On Call USB (2.5 mm)



Agamatrix

WaveSense Jazz

Agamatrix USB



Glucomètres et CGM - connectés avec un câble

Arkray

Glucocard 01
Glucocard Vital

Relion Confirm
Relion Prime

Arkray USB
(2,5 mm)



Glucocard Shine
Glucocard Shine XL
ReliOn Premier Blu

ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice

i-Sens USB
(2,5 mm)



Connectez le glucomètre et appuyez sur un bouton quelconque.

Glucocard Shine Connex

Glucocard Shine Express

Micro USB



Glucocard Expression

Medcore Care + GlucoCard Expression USB
(3,5 mm)



Connectez le glucomètre et sélectionnez **PC Link** dans son menu principal.

Ascensia (Bayer)

Breeze 2

Contour plus



Bayer's blue USB
(3,5 mm)

1. Connectez-le à votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton **M** du glucomètre.

Contour
Contour link

Contour TS
Contour XT

1. Connectez-le à votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton de mise sous tension du glucomètre.

Bayer Contour next
Contour care
Contour Fit

Contour next
Contour next One
Contour plus One

Micro USB



Contour next link
Contour next link 2.4

Contour USB
Contour next USB

USB on meter



B. Braun

Omnitest 3

Omnitest 3 USB
(2,5 mm)



Omnitest 5

Micro USB




Beurer

GL50 evo

USB on meter



Glucomètres et CGM - connectés avec un câble

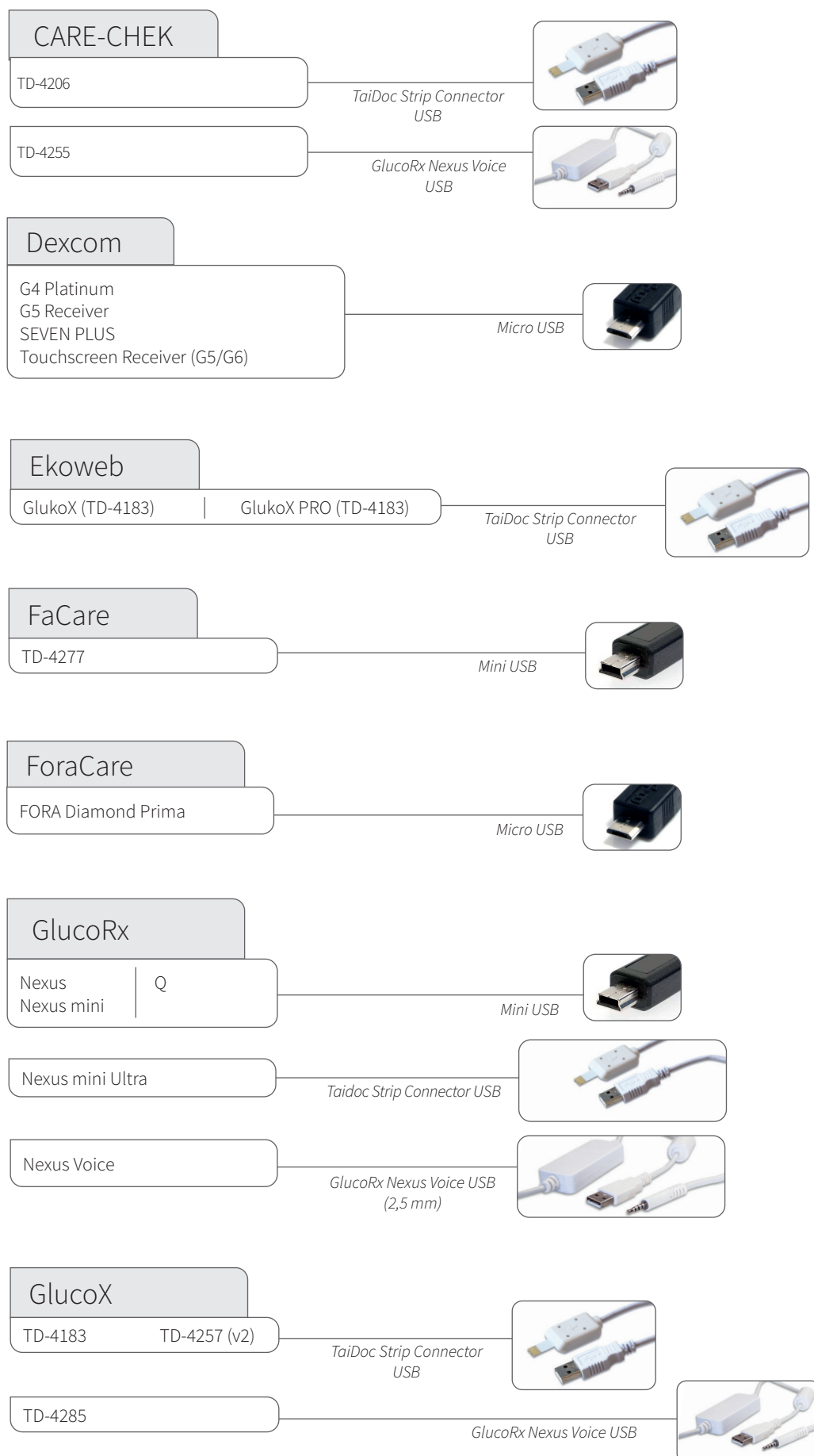

Glucomètres et CGM - connectés avec un câble

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB



CareSens COOL/Bravo
CareSens Dual
CareSens N
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Voice
CareSens Pro
CareSens TEE2 Plus
NoCoding1 Plus BLE



i-Sens USB
(2,5 mm)

1. Connectez-le à votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton **S** du glucomètre.

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB



LifeScan

OneTouch Ping

Mini USB



1. Connectez-le à votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton de mise sous tension du glucomètre.

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Ultra Plus Reflect

OneTouch Verio
OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

Micro USB



OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Pro

OneTouch Verio Sync

Mini USB



OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraEasy

OneTouch UltraMini
OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

LifeScan USB
(2,5 mm)



OneTouch UltraSmart

LifeScan USB
(2,5 mm)

1. Connectez-le à votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton noir de gauche.

Lifesmart

LS-946 (TD-4279)

TaiDoc Strip Connector
USB



MedCore

Care

Medcore care USB
(3,5 mm)



1. Connectez-le à votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton de mise sous tension du glucomètre.

Glucomètres et CGM - connectés avec un câble

Menarini

Glucomen areo

Glucomen areo 2K

Menarini Glucomen areo USB
(2,5 mm)

Glucomen Gm

Menarini white USB
(2,5 mm)

Glucomen LX Plus

Glucomen LX2

Menarini blue USB
(3,5 mm)

Si le glucomètre affiche : **E-3**,
déconnectez-le, patientez jusqu'à ce
que l'écran s'éteigne, puis connectez
à nouveau le glucomètre.

Nipro

4SURE Smart

Micro USB

TRUEresult
TRUE METRIX

TRUE METRIX AIR

Nipro dock USB

TRUEyou

TRUEyou mini

Nipro dock USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche - Accu-chek

Active

Aviva Connect
Performa Connect

Guide

Guide Me
Instant

Micro USB

Mobile (USB)

Micro USB

1. Connectez-le à votre ordinateur.
2. Le téléchargement devrait commencer dans les 20 secondes suivant la connexion du câble. Sinon, allez au menu principal sur le glucomètre. Sélectionnez **My data > PC analysis > Data Transfer**, et reconnectez le glucomètre au câble USB.
(Veuillez ne pas maintenir les deux boutons fléchés enfoncés.)

Sanofi

BGStar

MyStar Extra

Sanofi USB

Senseonics


Eversense Smart Transmitter (CGM)

REMARQUE !

L'Eversense Smart Transmitter (CGM) ne peut pas être téléversé via le dispositif diasend® Uploader.

Les données de l'Eversense CGM peuvent uniquement être téléversées dans diasend® via «**Connecter application**» dans le compte diasend® du patient. Reportez-vous à la page 10 de ce guide.

Glucomètres et CGM - connectés avec un câble

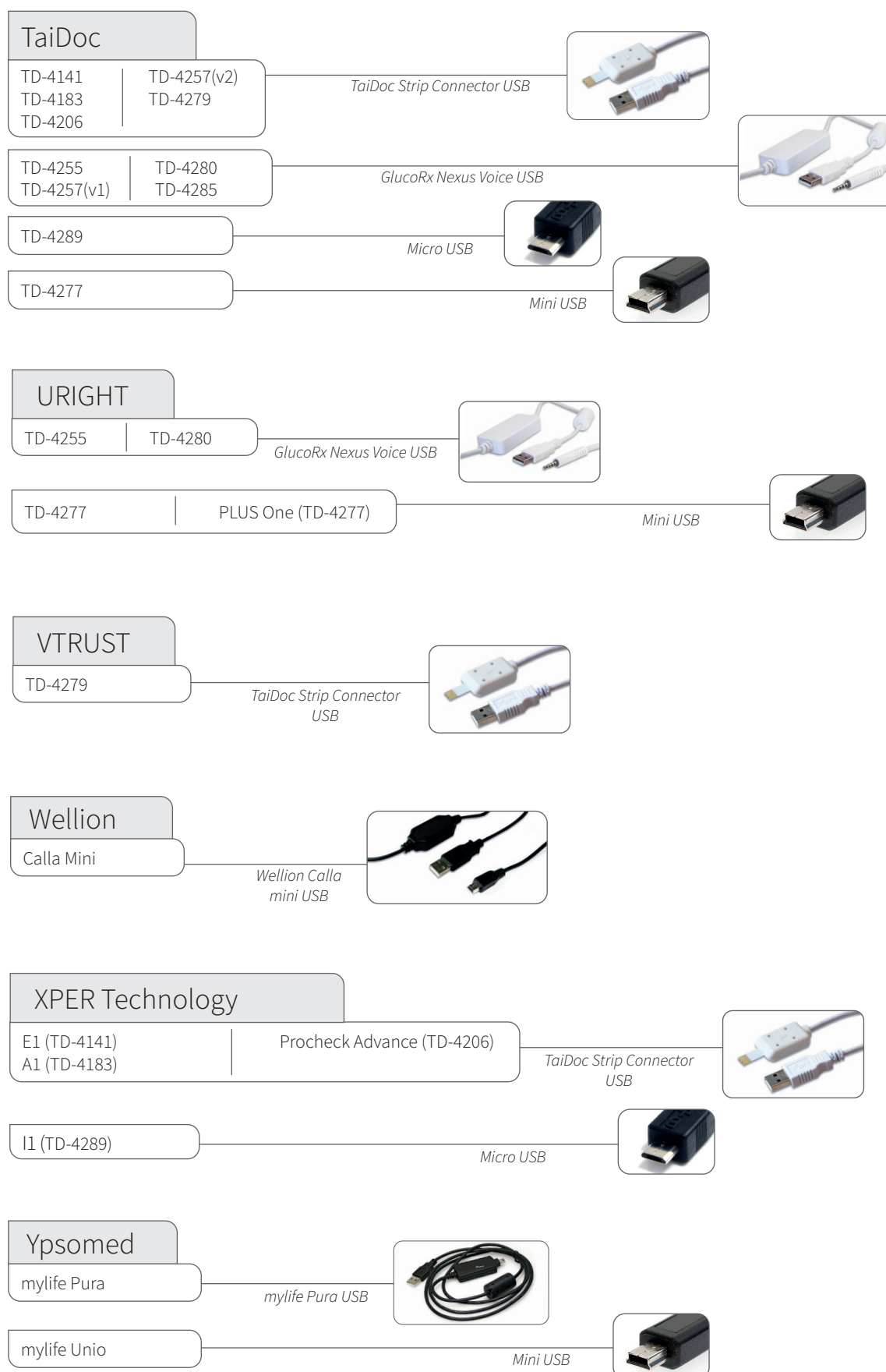



Glucomètres à infrarouge

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva
Accu-Chek Nano



ACTiSYS Li, Li2 ou Accu-Chek 360°

1. Connectez le câble IR à votre ordinateur.
2. Activez la transmission IR en appuyant sur les deux boutons fléchés et en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que deux flèches apparaissent à l'écran.


Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 ou Accu-Chek 360°

1. Connectez le câble IR à votre ordinateur.
2. Activez la transmission IR en appuyant sur les boutons **S** et **M** situés sous l'écran et en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que deux flèches apparaissent.


Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert

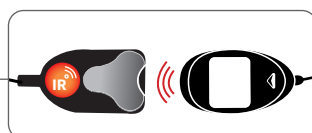

ACTiSYS Li, Li2 ou Accu-Chek 360°

1. Connectez le câble IR à votre ordinateur.
2. Dans le menu principal, allez sur **My data** et sélectionnez **Data transfer**.

Accu-Chek Mobile (IR)

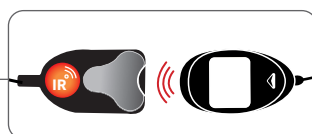


ACTiSYS Li, Li2 ou Accu-Chek 360°

1. Connectez le câble IR à votre ordinateur.
2. Appuyez sur les deux boutons fléchés et maintenez-les enfoncés.
3. Dans le menu de transfert de données, sélectionnez la première option (**for analysis**).




Câbles infrarouges compatibles

Câble ACTiSYS - Li

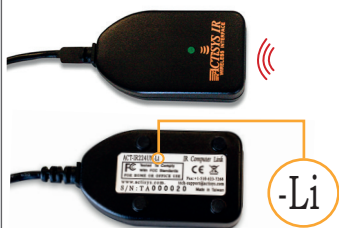

Systèmes d'exploitation compatibles :
macOS X: 10.14–11.0
Windows: -

Câble ACTiSYS - Li2

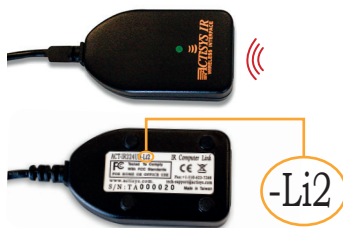

Systèmes d'exploitation compatibles :
macOS X: 10.14–11.0
Windows: 8, 10

Câble Accu-Chek - 360° (Realtyme)




Systèmes d'exploitation compatibles :
macOS X: 10.14–11.0
Windows: 8, 10



Câble manquant ?

Veuillez communiquer avec le fabricant de votre dispositif de suivi de diabète spécifique.

Pompes à insuline - connectées avec un câble USB standard

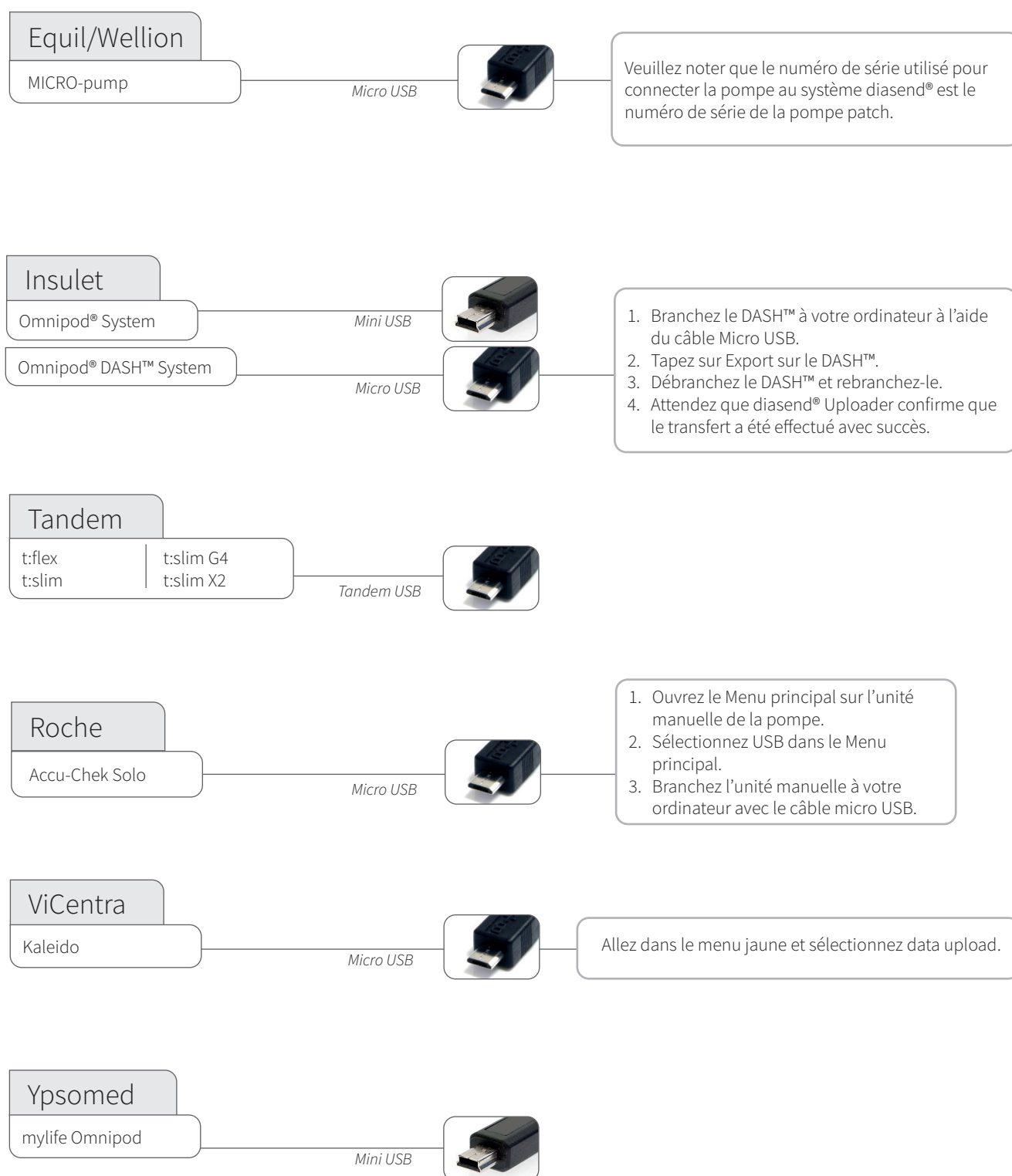




Pompes à insuline infrarouges

Animas (IR)

1200
1250
2020
OneTouch Ping
Vibe

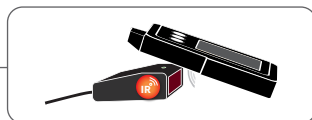


ACTiSYS Li ou Li2
Remarque ! Si vous utilisez Windows 8 ou 10, vous devez utiliser le câble ACTiSYS Li2

1. Arrêtez la pompe. (MENU PRINCIPAL, faites défiler jusqu'à **Suspnd/Resum** et appuyez sur **OK** ; **Suspend** est mis en surbrillance).
2. Appuyez sur **OK**.
3. Positionnez la pompe en orientant sa partie arrière vers l'adaptateur câblé IR Actisys.
4. Lorsque la transmission est terminée : Redémarrez la pompe (MENU PRINCIPAL, faites défiler jusqu'à **Suspnd/Resum** et appuyez sur **OK** ; **Resume** est mis en surbrillance). Appuyez sur **OK**.




Câbles infrarouges compatibles

Câble ACTiSYS - Li

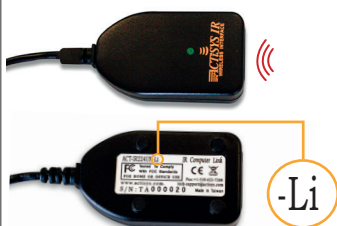

Systèmes d'exploitation compatibles :
macOS X: 10.14–11.0
Windows: -

Câble ACTiSYS - Li2

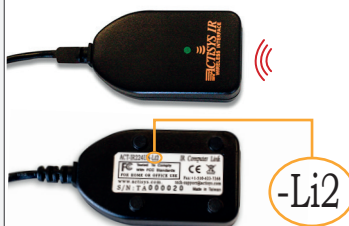

Systèmes d'exploitation compatibles :
macOS X: 10.14–11.0
Windows: 8, 10




Câble manquant ?

Veuillez communiquer avec le fabricant de votre dispositif de suivi de diabète spécifique.



Pompes à insuline infrarouges

Roche
Accu-Chek Insight

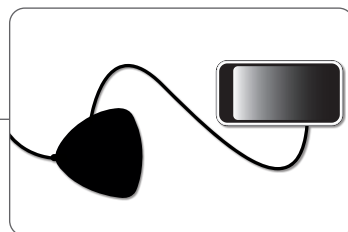

Smart Pix 2

Remarque ! Connectez le lecteur de votre pompe au Smart Pix 2 avec un câble micro USB.

1. Connectez le câble Smart Pix 2 à votre ordinateur et attendez que le voyant bleu sur le Smart Pix 2 commence à clignoter lentement.
2. Connectez le lecteur au Smart Pix 2 avec un câble micro USB.
3. Dans le menu du lecteur, sélectionnez **Connect to PC** et appuyez sur **OK**.
4. Assurez-vous que la pompe est à la portée du lecteur.
5. Le voyant bleu sur le Smart Pix 2 est allumé durant la transmission de données à partir du lecteur vers le Smart Pix 2.
6. Le voyant bleu s'éteint et Smart Pix 2 et le lecteur émettent tous deux un son pour indiquer que la transmission de données à partir de Smart Pix 2 vers Uploader s'effectue. Ne déconnectez pas encore le Smart Pix 2 !
7. Attendez que Uploader indique que le téléchargement a réussi.

Roche
Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix ou Smart Pix 2

Remarque ! La version du logiciel Smart Pix 3.02 ou supérieure est nécessaire lorsque vous utilisez Smart Pix.

1. Connectez le Smart Pix à votre ordinateur et attendez que le voyant bleu sur le Smart Pix commence à clignoter lentement.
2. Mettez la pompe en **Data Transfer** mode (arrêtez la pompe et accédez au menu **Data Transfer**).
3. Positionnez la pompe en orientant l'œil IR vers le Smart Pix. Le voyant bleu signale la transmission de données vers le Smart Pix.
4. Attendez que le voyant bleu commence à clignoter lentement à nouveau ou qu'il cesse de clignoter.
5. La transmission de données à partir de Smart Pix vers Uploader est en cours. Ne déconnectez pas encore le Smart Pix !
6. Attendez que Uploader indique que le téléchargement a réussi.



Câbles infrarouges compatibles

*Câble Roche Accu-Chek
Smart Pix*



Systèmes d'exploitation compatibles :
macOS X: 10.14–11.0
Windows: 8, 10

*Câble Roche Accu-Chek
Smart Pix 2*



Systèmes d'exploitation compatibles :
macOS X: 10.14–11.0
Windows: 8, 10



Câble manquant ?

Veuillez communiquer avec le fabricant de votre dispositif de suivi de diabète spécifique.

**ATTENTION!**

Consultez toujours votre médecin si vous décelez des anomalies dans les informations affichées dans diasend®. Ne modifiez jamais vos doses médicamenteuses avant de consulter votre médecin ! Tous les diagnostics médicaux et traitements des patients doivent être effectués sous la surveillance de professionnels de la santé qualifiés ! diasend® n'est pas destiné à fournir des décisions automatisées concernant les traitements ni à se substituer au jugement d'un professionnel de la santé. diasend® n'a pas été conçu pour les appels d'urgence ou pour la transmission ou le signalement d'alarmes en temps réel ou de données à caractère urgent ! diasend® n'a pas été conçu pour se substituer à une surveillance médicale directe ou à une intervention d'urgence !



Glooko AB
+46 (0)31-762 08 88
Nellickevägen 20
412 63 Göteborg
SWEDEN

Assistance Canada
1-888-DIASEND (1-888-342-7363)
canada@diasend.com
www.diasend.com

