

# diasend®

## POUR COMMENCER

### CRÉEZ UN COMPTE

Vous recevrez un courriel de votre fournisseur de soins de santé intitulé « Votre fournisseur de soins vous invite à rejoindre diasend® ». Cliquez sur le lien « Cliquez ici pour commencer » contenu dans ce courriel, puis suivez les étapes ci-dessous. Si vous n'avez pas reçu ce courriel, vous pouvez créer un compte à l'adresse [www.diasend.com](http://www.diasend.com) en choisissant votre langue et votre pays dans le menu déroulant, puis en cliquant sur le bouton « Créer votre compte diasend® ».

### DONNÉES DE CONNEXION ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Entrez votre adresse de courriel, qui sera votre nom d'utilisateur, ainsi qu'un mot de passe de votre choix pour votre compte diasend® personnel. Prenez note que votre mot de passe doit être composé d'au moins 8 caractères. Cliquez sur continuer.

Entrez vos renseignements personnels : prénom, nom de famille, date de naissance, adresse et des informations concernant votre diabète. Cliquez sur continuer.

### PARTAGE DES DONNÉES

Si vous avez reçu une invitation de votre fournisseur de soins de santé par courriel, le numéro d'identification de la clinique sera déjà rempli. Il s'agit du numéro d'identification unique de votre clinique qui vous permet de partager vos données avec eux.

Si vous n'avez pas reçu d'invitation, vous pouvez ajouter le numéro d'identification de la clinique plus tard en vous rendant à l'onglet « Administration du compte - Partage des données ».

### CONFIRMEZ VOTRE INSCRIPTION

Cochez la case pour indiquer que vous acceptez les modalités et pour confirmer votre inscription.

### TÉLÉVERSEZ VOS DONNÉES SUR LE DIABÈTE

Vous pouvez téléverser vos données sur le diabète vers diasend® à l'aide de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur ou les partager grâce à des applications connectées.

Pour procéder au téléversement à partir de votre ordinateur, vous devez installer l'outil de téléversement diasend® sur votre PC ou Mac. Démarrez l'installation en cliquant sur l'icône à l'écran sur lequel vous êtes dirigé après avoir terminé votre inscription. Suivez les instructions d'installation à l'écran.

Pour téléverser depuis votre téléphone mobile, vous devez installer l'application mobile diasend® et suivre les instructions.

Merci

Votre compte diasend® Personal est à présent enregistré.



# TÉLÉVERSEZ VOS DONNÉES SUR LE DIABÈTE

## DÉMARREZ L'OUTIL DE TÉLÉVERSEMENT DIASEND®

Double cliquez sur l'icône de l'outil de téléversement diasend® sur votre ordinateur (si vous utilisez un Mac, rendez-vous dans le dossier « Applications » ou sur « Launchpad » pour trouver l'outil de téléversement diasend®).




## BRANCHEZ LE CÂBLE DE VOTRE APPAREIL

Branchez le câble ou le dongle infrarouge de votre appareil à un port USB sur votre ordinateur.

REMARQUE : Pour télécharger les données d'un PDM Omnipod® sur un ordinateur Mac fabriqué avant mi-2012 fonctionnant sur OS X El Capitan, il est recommandé d'utiliser un concentrateur USB.


## BRANCHEZ VOTRE APPAREIL AU CÂBLE

Branchez l'appareil au câble ou placez-le devant le dongle infrarouge.

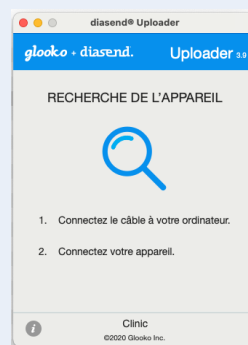

## L'APPAREIL COMMENCERA À TÉLÉVERSER SES DONNÉES

Ne débranchez pas votre appareil jusqu'à ce que l'ensemble du processus de téléversement soit terminé.

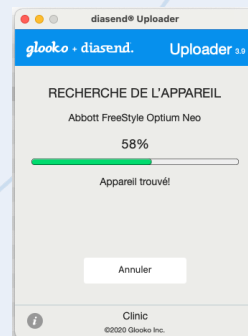


## VÉRIFIEZ VOTRE COMPTE

Entrez votre nom d'utilisateur (votre adresse de courriel complète et le mot de passe que vous avez choisi lors de la création de votre compte). Cliquez sur S'authentifier.

## CONSULTEZ VOS DONNÉES

Connectez-vous au [www.diasend.com](http://www.diasend.com) pour consulter vos données.

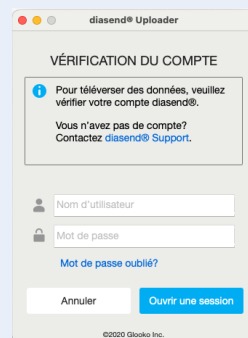

## BESOIN D'AIDE?

Contactez-nous à l'adresse [canada@diasend.com](mailto:canada@diasend.com) ou par téléphone au 1-888-DIASEND (1-888-342-7363)