


# SMARTA INSULINPENNOR


## Hur de används med diasend®

### SÅ HÄR LADDAR DU UPP DATA FRÅN DIN SMARTA INSULINPENNA

1. Du behöver en telefon med NFC-chip för att ladda upp data från en smart insulinpenna.
2. Se till att doseringsknappen är helt intryckt och att dosräknaren står på noll.
3. Starta diasend® Mobile App och logga in. Appen finns att ladda ner från AppStore (iOS) och Google Play (Android).
4. Håll insulinpennan mot telefonens NFC-chip. Överföringen av data startar automatiskt. När överföringen är klar hörs ett kort pling.

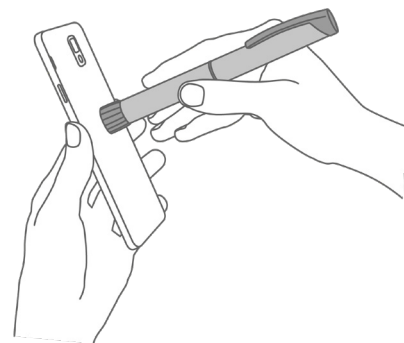


5.

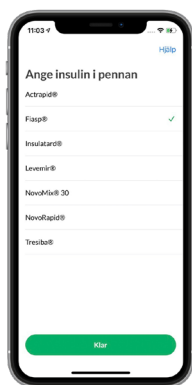

Första gången du laddar upp en penna kommer du att bli ombedd att välja vilket insulin pennan ska användas till.



Rapporter visar dina insulindoser över en tidslinje.

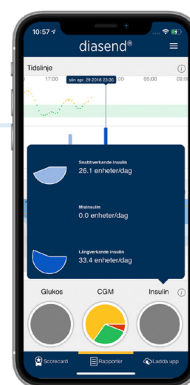

Du kan också se ett cirkeldiagram över dina insulindoser i samma vy.

### VAR FINNS NFC-CHIPET PÅ DIN TELEFON?

Ofta är NFC-chipet placerat mitt på telefonens baksida, men det kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta mobiltelefon tillverkaren om det uppstår anslutningsproblem mellan pennan och telefonen och för att ta reda på var NFC-chipet sitter på din telefon. Överföring av data startar automatiskt så snart telefonen ansluter till penna.

NovoPen®, Tresiba® and FIASP® är registrerade varumärken som ägs av Novo Nordisk.