




Wie Sie die FreeStyle LibreLink-App mit diasend® verbinden - Einfache Synchronisation Ihrer FreeStyle Libre Daten mit diasend® (Derzeit nur außerhalb der USA verfügbar)




Voraussetzungen:

- ein diasend® Personal Konto – KOSTENLOS für Patienten.
- ein Android Smartphone oder iPhone mit FreeStyle LibreLink-App.

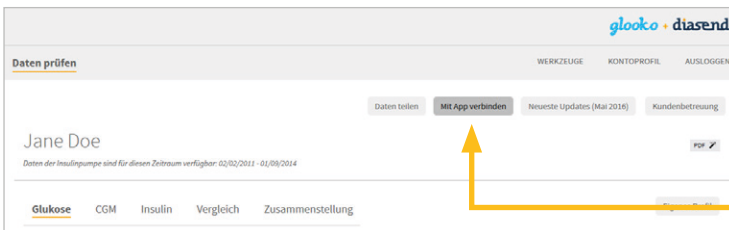


1 Loggen Sie sich in Ihrem diasend® Personal Konto auf www.diasend.com ein und klicken Sie auf **“Mit App verbinden”** um die Werte von Ihrem Freestyle Libre mit diasend® zu synchronisieren.

Mit App verbinden

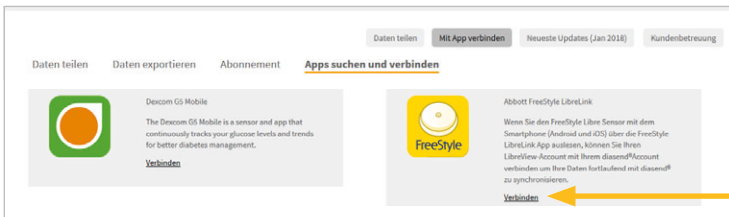

2 Unter Abbott FreeStyle LibreLink klicken Sie bitte auf **“Verbinden”**.

Verbinden

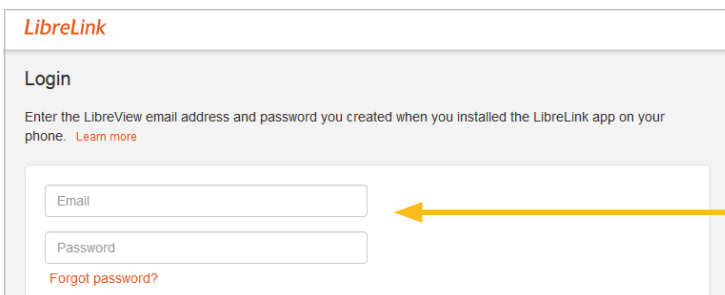

3 Bestätigen Sie Benutzernamen und Passwort für Ihr **LibreLink Konto** um die Verbindung zwischen Ihrer LibreLink-App und Ihrem diasend® Personal Konto zu autorisieren. Wenn Sie Schritt 1-3 abgeschlossen haben, können Sie die ersten Daten übertragen.



4 Öffnen Sie die LibreLink-App auf Ihrem Android Smartphone oder iPhone um Ihren FreeStyle Libre Sensor damit zu **scannen**.

Die mit Ihrem Smartphone ausgelesenen Werte werden nun in Ihrem diasend® Personal Konto angezeigt und Sie können diese einfach mit Ihrem Gesundheitsdienstleister teilen. Neue Daten werden nun jedesmal übertragen, wenn Sie den Sensor mit Ihrem Smartphone scannen.

Bitte beachten Sie:

Falls Sie kein Android Smartphone oder iPhone besitzen, können Sie mithilfe Ihres Freestyle Libre Lesegerätes Werte zu diasend® übertragen. Benutzen Sie in diesem Falle einfach die diasend® Uploader Software auf Ihrem Computer und schliessen Sie Ihr Freestyle Libre Lesegerät mit einem Micro-USB-Datenkabel an Ihren Computer an. Haben Sie weitere Geräte auf Ihrem diasend® Konto registriert, werden die Werte Ihres FreeStyle Libre zusammen mit den Werten Ihrer anderen Geräte angezeigt. FreeStyle LibreLink ist eine mobile Anwendung, entwickelt und bereitgestellt von Abbott. Voraussetzung für die Nutzung von FreeStyle LibreLink ist die Registrierung für den LibreView Service, der von Abbott bereitgestellt wird. Die FreeStyle LibreLink-App ist mit Smartphones kompatibel, die mit NFC ausgerüstet sind und ein Android-Betriebssystem der Version 5.0, oder iPhone 7 der Version iOS 11, oder höher installiert haben. Alle erwähnten Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.