



# diasend<sup>®</sup> Mobile App

– HURTIGVEILEDNING FOR OPPLASTING

D0422v11F 2021-01-27  
støtter A14030R11

*glooko*

# Innhold

---

Vær oppmerksom på at noen av de følgende pasientenheter muligens ikke er tilgjengelig i ditt marked.

---

 Acon OnCall Extra Mobile

---

 Acon OnCall Sure Sync

---

 AgaMatrix WaveSense JAZZ Wireless

---

 Ascensia Contour Care

---

 Ascensia Contour Next

---

 Ascensia Contour Next One

---

 Ascensia Contour Plus One

---

 ForaCare FORA 6 Connect

---

 ForaCare FORA Diamond MINI DM30

---

 ForaCare FORA GD40h

---

 i-Sens Caresens Dual

---

 i-Sens NoCoding1 Plus

---

 i-Sens TEE2+

---

 Menarini Glucofix Tech

---

 Menarini GlucoMen areo 2K

---

 Menarini GlucoMen areo

---

 Nipro 4Sure Smart

---

 Nipro 4Sure SmartDuo

---

 NovoPen

---

 Roche Accu-Chek Aviva Connect

---

 Roche Accu-Chek Guide

---

 Roche Accu-Chek Instant

---

 Sanofi MyStar Plus

---

 SOOIL Dana RS

---

 Trividia TRUE METRIX AIR

---


*Finner du ikke enheten din i listen?*  
Last opp med diasend® Uploader  
på din Mac eller PC

*(siste side)*

# Acon OnCall Extra Mobile

---




1. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
2. Start diasend<sup>®</sup>-mobilappen.
3. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.  
 (For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
4. Trykk **Start opplasting** i appen.
5. Trykk og hold begge piltastene på måleren til displayet er slått på. "bt" skal vises på displayet.
6. Velg måleren din når den vises i appen. Når du blir bedt om å parkoble måleren, angir du de siste 6 sifrene i målerens serienummer, som er angitt på baksiden av måleren.
7. diasend<sup>®</sup>-appen kobles nå til måleren og starter synkronisering.
8. Synkronisere måleren i fremtiden: Start diasend<sup>®</sup>-appen, gå til **LAST OPP** og trykk **Start opplasting**. Slå på måleren ved å trykke begge piltastene. Synkroniseringen startes automatisk.

## Acon OnCall Sure Sync

---



1. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
2. Start diasend<sup>®</sup>-mobilappen.
3. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.  (For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
4. Trykk **Start opplasting** i appen.
5. Trykk og hold begge piltastene på måleren til displayet er slått på. "bt" skal vises på displayet.
6. Velg måleren din når den vises i appen. Når du blir bedt om å parkoble måleren, angir du de siste 6 sifrene i målerens serienummer, som er angitt på baksiden av måleren.
7. diasend<sup>®</sup>-appen kobles nå til måleren og starter synkronisering.
8. Synkronisere måleren i fremtiden: Start diasend<sup>®</sup>-appen, gå til **LAST OPP** og trykk **Start opplasting**. Slå på måleren ved å trykke begge piltastene. Synkroniseringen startes automatisk.


# AgaMatrix WaveSens JAZZ Wireless

---



1. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
2. Start diasend<sup>®</sup>-mobilappen.
3. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
4. Trykk **Start opplasting** i appen.
5. Hold inne målerknappen på måleren til Bluetooth-ikonet begynner å blinke.
6. Velg måleren din når den vises i appen. En 6-sifret kode vises på måleren.

*Eksempel på kode:*

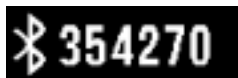

7. Skriv inn nummeret i appen.
8. Måleren indikerer at parkoblingen var vellykket med et avmerkingssymbol.

*Eksempel på avmerkingssymbol:*




9. Måleren og appen begynner å synkronisere.
10. Synkronisere måleren i fremtiden: Start diasend<sup>®</sup>-appen, gå til **LAST OPP** og trykk **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen startes automatisk.

# Ascensia Contour Care

---




1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Slå PÅ måleren. Trykk og hold begge pilknappene inne til Bluetooth-symbolet begynner å blinke i displayet.
7. Velg måleren når den vises i appen.
8. Bekreft paringsforespørselen i diasend®-appen ved hjelp av koden i målerens display.
9. Måleren og appen starter synkroniseringen.
10. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden: Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen starter automatisk.

## Ascensia Contour Next

---



1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Slå PÅ måleren. Trykk og hold begge pilknappene inne til Bluetooth-symbolet begynner å blinke i displayet.
7. Velg måleren når den vises i appen.
8. diasend®-appen vil nå koble seg til måleren.
9. Bekreft paringsforespørselen i diasend®-appen ved hjelp av koden i målerens display.
10. Måleren og appen starter synkroniseringen.
11. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden: Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen starter automatisk.

# Ascensia Contour Next One

---



1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start diasend<sup>®</sup>-mobilappen.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk **Start opplasting** i appen.
6. Hold inne **OK-knappen** på måleren til det blå lyset i teststrimmelporten begynner å blinke. Målerens serienummer vises på displayet.

*Eksempel på måler i parkoblingsmodus:*



7. Velg målerens serienummer i appen.
8. diasend<sup>®</sup>-appen kobles nå til måleren.
9. Bekreft forespørselen om parkobling i diasend<sup>®</sup>-appen.
10. Måleren og appen begynner å synkronisere.
11. Synkronisere måleren i fremtiden: Start diasend<sup>®</sup>-appen, gå til **LAST OPP** og trykk **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen startes automatisk.



# Ascensia Contour Plus One

---



1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start diasend<sup>®</sup>-mobilappen.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk **Start opplasting** i appen.
6. Hold inne **OK-knappen** på måleren til det blå lyset i teststrimmelporten begynner å blinke. Målerens serienummer vises på displayet.

*Eksempel på måler i parkoblingsmodus:*




7. Velg målerens serienummer i appen.
8. diasend<sup>®</sup>-appen kobles nå til måleren.
9. Bekreft forespørselen om parkobling i diasend<sup>®</sup>-appen.
10. Måleren og appen begynner å synkronisere.
11. Synkronisere måleren i fremtiden: Start diasend<sup>®</sup>-appen, gå til **LAST OPP** og trykk **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen startes automatisk.

# ForaCare FORA 6 Connect

---




1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
*(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).*
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Trykk på pil opp-knappen på måleren for å starte Bluetooth-paringen.
7. Velg måleren når den vises i appen.
8. Bekreft eventuelt paringen på den mobile enheten.
9. Måleren og appen starter synkroniseringen.
10. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden: Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen starter automatisk.

# ForaCare FORA Diamond MINI DM30

---




1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Slå måleren PÅ og AV igjen for å aktivere Bluetooth (lyset blinker blått).
7. Velg måleren i diasend®-appen.
8. Bekreft eventuelt paringsforespørselen på den mobile enheten.
9. Måleren og appen starter synkroniseringen.
10. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden: Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. Slå måleren på og av igjen for å aktivere Bluetooth. Synkroniseringen starter automatisk.

## ForaCare FORA GD40h

---



1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. På måleren trykker du glideknappen på venstre side nedover, til det blå lyset begynner å blinke. Bluetooth er nå aktivert.
7. I diasend®-appen velger du måleren.
8. Bekreft eventuelt paringsforespørselen på den mobile enheten.
9. Måleren og appen starter synkroniseringen.
10. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden: Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. På måleren trykker du glideknappen nedover for å aktivere Bluetooth. Synkroniseringen starter automatisk.

## i-Sens CareSens Dual

---




1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Slik aktiverer du Bluetooth-paring på måleren:  
Trykk og hold **S**-knappen på måleren inne til **SET** vises i displayet. Trykk på pilknappen til **JA** begynner å blinke. Bekreft ved å trykke på **S**-knappen. **bT** vil vises i displayet. Trykk på pilknappen til **Par** begynner å blinke. Bekreft ved å trykke på **S**-knappen. **Pin** vises i displayet.
7. I diasend®-appen velger du måleren.
8. Et pin-nummer (6 sifre) vises i målerens display. Skriv inn pin-nummeret i diasend®-appen for å bekrefte paringsforespørselen.
9. Måleren og appen starter synkroniseringen.
10. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden:  
Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen starter automatisk\*.

*\*Bare når det finnes data som ikke er overført.*

## i-Sens NoCoding1 Plus

---



1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Slik aktiverer du Bluetooth-paring på måleren:  
Trykk og hold **AV/PÅ**-knappen på måleren inne til **SET** vises i displayet. Trykk på pilknappen til **JA** begynner å blinke. Bekreft ved å trykke på **AV/PÅ**-knappen. **bT** vises i displayet. Trykk på pilknappen til **Par** begynner å blinke. Bekreft ved å trykke på **AV/PÅ**-knappen. **Pin** vises i displayet.
7. I diasend®-appen velger du måleren.
8. Et pin-nummer (6 sifre) vises i målerens display. Skriv inn pin-nummeret i diasend®-appen for å bekrefte paringsforespørselen.
9. Måleren og appen starter synkroniseringen.
10. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden:  
Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen starter automatisk\*.

*\*Bare når det finnes data som ikke er overført.*

## i-Sens TEE2+

---



1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Slik aktiverer du Bluetooth-paring på måleren:  
Trykk og hold **AV/PÅ**-knappen på måleren inne til **SET** vises i displayet. Trykk på pilknappen til **JA** begynner å blinke. Bekreft ved å trykke på **AV/PÅ**-knappen. **bT** vises i displayet. Trykk på pilknappen til **Par** begynner å blinke. Bekreft ved å trykke på **AV/PÅ**-knappen. **Pin** vises i displayet.
7. I diasend®-appen velger du måleren.
8. Et pin-nummer (6 sifre) vises i målerens display. Skriv inn pin-nummeret i diasend®-appen for å bekrefte paringsforespørselen.
9. Måleren og appen starter synkroniseringen.
10. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden:  
Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen starter automatisk\*.

*\*Bare når det finnes data som ikke er overført.*



# Menarini Glucofix Tech

(Kun Android)

---



1. Kontroller at NFC er aktivert på den mobile enheten og måleren.
2. Slå AV måleren og start diasend<sup>®</sup>-mobilappen. Hold måleren mot NFC-brikken på den mobile enheten. (NFC-enheten er vanligvis plassert på baksiden av mobilenheten).

## **Aktiver NFC på måleren ved å følge disse trinnene:**

1. Slå AV måleren.
2. Hold inne **PÅ/AV-knappen** til "set" vises på displayet.
3. Hold inne **ned-knappen** til "N" begynner å blinke.
4. Velg denne funksjonen ved å trykke på **PÅ/AV-knappen**.
5. Trykk én gang på **ned-knappen**, "On" begynner å blinke.
6. Bekreft ved å trykke én gang på **PÅ/AV-knappen**.
7. Slå AV måleren.





# Menarini GlucoMen areo 2K

---



1. Kontroller at NFC er aktivert på den mobile enheten og måleren.
2. Slå AV måleren og start diasend<sup>®</sup>-mobilappen. Hold måleren mot NFC-brikken på den mobile enheten. (NFC-enheten er vanligvis plassert på baksiden av mobilenheten).

*Merk: For iOS-brukere er denne måleren bare kompatibel via NFC hvis måleren er produsert i 2018 eller senere.*

## **Aktiver NFC på måleren ved å følge disse trinnene:**

1. Slå AV måleren.
2. Avhengig av hvilken versjon du har: Åpne innstillingsmenyen ved å holde inne **PÅ/AV-knappen** eller **PÅ/AV-knappen** og **pil opp-knappen** samtidig til det står «**set**» på skjermen.
3. Hold inne **ned-knappen** til “N” begynner å blinke.
4. Velg denne funksjonen ved å trykke på **PÅ/AV-knappen**.
5. Trykk én gang på **ned-knappen**, “On” begynner å blinke.
6. Bekreft ved å trykke én gang på **PÅ/AV-knappen**.
7. Slå AV måleren.



# Menarini GlucoMen areo

(Kun Android)

---



1. Kontroller at NFC er aktivert på den mobile enheten og måleren.
2. Slå AV måleren og start diasend®-mobilappen. Hold måleren mot NFC-brikken på den mobile enheten. (NFC-enheten er vanligvis plassert på baksiden av mobilenheten).


## **Aktiver NFC på måleren ved å følge disse trinnene:**

1. Slå AV måleren.
2. Hold inne **PÅ/AV-knappen** til “set” vises på displayet.
3. Hold inne **ned-knappen** til “N” begynner å blinke.
4. Velg denne funksjonen ved å trykke på **PÅ/AV-knappen**.
5. Trykk én gang på **ned-knappen**, “On” begynner å blinke.
6. Bekreft ved å trykke én gang på **PÅ/AV-knappen**.
7. Slå AV måleren.

## Nipro 4Sure Smart

---




1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Slå PÅ måleren. Bluetooth aktiveres automatisk.
7. I appen velger du måleren.
8. Bekreft eventuelt paringsforespørselen på den mobile enheten.
9. Måleren og appen starter synkroniseringen.
10. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden: Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen starter automatisk.

## Nipro 4Sure SmartDuo

---



1. Slå AV måleren.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
*(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).*
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Slå PÅ enheten. Bluetooth aktiveres automatisk.
7. I appen velger du måleren.
8. Bekreft eventuelt paringsforespørselen på den mobile enheten.
9. Måleren og appen starter synkroniseringen.
10. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden: Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen starter automatisk.




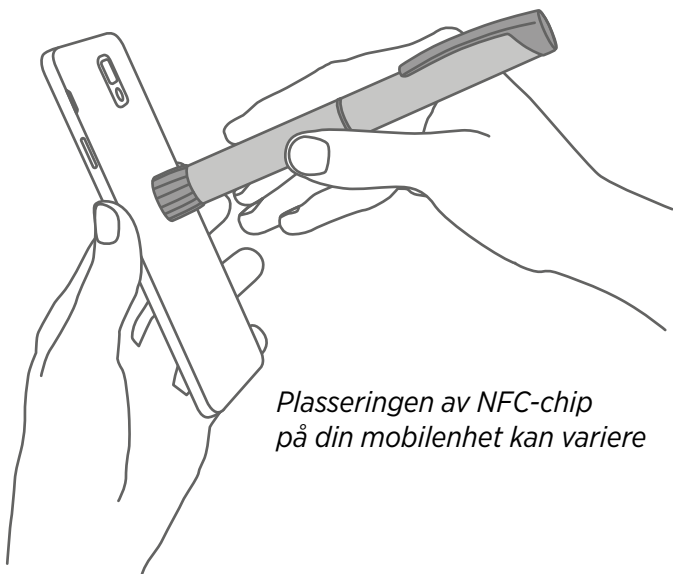
# NovoPen<sup>®</sup> 6

# NovoPen Echo<sup>®</sup> Plus

---



1. Kontroller at NFC er aktivert på den mobile enheten.
2. Start diasend<sup>®</sup>-mobilappen.
3. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg NFC som overføringsmetode).
4. Hold NovoPen<sup>®</sup> mot NFC-brikken på den mobile enheten.




*Plasseringen av NFC-chip på din mobilenhet kan variere*

# Roche Accu-Chek Aviva Connect




## Parkoble måler


1. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
2. Slå på måleren ved å trykke **OK**.
3. Velg **Settings** og trykk **OK**.

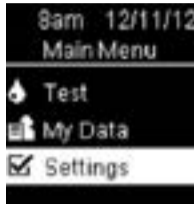


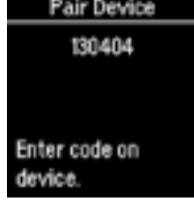
4. Bla ned for å velge **Wireless**, og trykk **OK**.

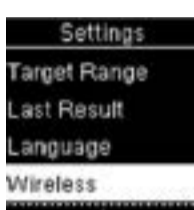

5. Velg **Yes** og trykk **OK**.

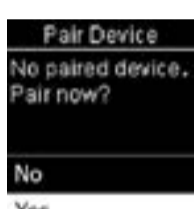


6. Start diasend®-mobilappen.
7. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg *Bluetooth som overføringsmetode*).
8. Trykk **Start opplasting** i appen.
9. Velg måleren din når den vises i appen. Når du blir bedt om å parkoble måleren, angir du de 6 sifrene som vises på måleren.




## Dataoverføring


Hvis du vil synkronisere alle avlesninger i målerens historikk, kan du foreta en dataoverføring. Dette sender alle avlesninger som er lagret på måleren til diasend®.

Trykk tilbake til du er i Hovedmenyen, eller slå på måleren ved å trykke **OK**.


10. Start diasend®-mobilappen.
11. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen. 
12. Trykk **Start opplasting** i appen.
13. Velg **My Data** og trykk **OK**.

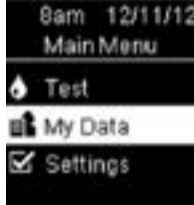

14. Velg **Data Transfer** og trykk **OK**.

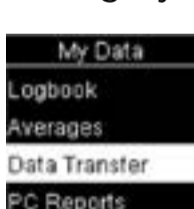

15. Velg **Wireless** og trykk **OK**.

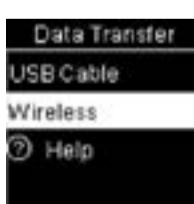


16. Måleren og diasend®-appen starter nå synkronisering.

# Roche Accu-Chek Guide



## Parkoble måler


1. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
2. Slå på måleren ved å trykke **OK**.
3. Velg **Settings** og trykk **OK**.

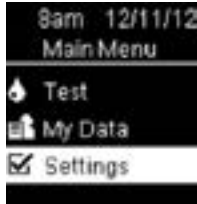


4. Bla ned for å velge **Wireless**, og trykk **OK**.



5. Velg **Yes** og trykk **OK**.

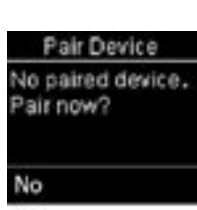


6. Start diasend®-mobilappen.
7. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg *Bluetooth som overføringsmetode*).
8. Trykk **Start opplasting** i appen.
9. Velg måleren din når den vises i appen. Når du blir bedt om å parkoble måleren, angir du de 6 sifrene som vises på måleren.




## Dataoverføring


Hvis du vil synkronisere alle avlesninger i målerens historikk, kan du foreta en dataoverføring. Dette sender alle avlesninger som er lagret på måleren til diasend®.

Trykk tilbake til du er i Hovedmenyen, eller slå på måleren ved å trykke **OK**.


10. Start diasend®-mobilappen.
11. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen. 
12. Trykk **Start opplasting** i appen.
13. Velg **My Data** og trykk **OK**.

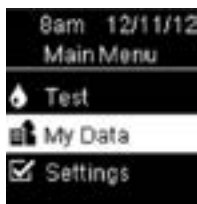

14. Velg **Data Transfer** og trykk **OK**.

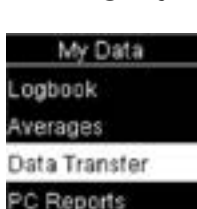

15. Velg **Wireless** og trykk **OK**.

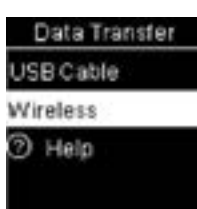

16. Måleren og diasend®-appen starter nå synkronisering.


# Roche Accu-Chek Instant

---



1. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
2. Når måleren er av, trykker du på målerknappen og holder den inne til Bluetooth-symbolet vises. Parkoblingsymbolet og det trådløse symbolet vises og blinker.



3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.  (For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Velg måleren din når den vises i appen. Når du blir bedt om å parkoble måleren, angir du den sekscifrede PIN-koden på baksiden av måleren.

*Eksempelbilde på PIN-kode:*



7. diasend®-appen blir nå koblet til måleren og starter synkronisering.
8. Slik synkroniserer du måleren i fremtiden: Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP** og trykk på **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen starter automatisk.




# Sanofi MyStar Plus

---



1. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
2. Start diasend<sup>®</sup>-mobilappen.
3. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
4. Trykk **Start opplasting** i appen.
5. Hold inne målerknappen på måleren til Bluetooth-ikonet begynner å blinke.
6. Velg måleren din når den vises i appen. En 6-sifret kode vises på måleren.

*Eksempel på kode:*

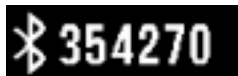

7. Skriv inn nummeret i appen.
8. Måleren indikerer at parkoblingen var vellykket med et avmerkingssymbol.

*Eksempel på avmerkingssymbol:*




9. Måleren og appen begynner å synkronisere.
10. Synkronisere måleren i fremtiden: Start diasend<sup>®</sup>-appen, gå til **LAST OPP** og trykk **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen startes automatisk.

## SOOIL Dana RS

---





1. Slå AV pumpen.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at pumpen er mindre enn 10 meter unna.
3. Start mobilappen diasend®.
4. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
5. Trykk på **Start opplasting** i appen.
6. Slå PÅ pumpen. Bluetooth aktiveres automatisk.
7. I appen velger du pumpen.
8. Bekreft eventuelt paringsforespørselen på den mobile enheten.
9. Pumpen og appen starter synkroniseringen.
10. Slik synkroniserer du pumpen i fremtiden: Start diasend®-appen, gå til **LAST OPP**, og trykk på **Start opplasting**. Slå på pumpen. Synkroniseringen starter automatisk.

# Trividia TRUE METRIX AIR

---



1. Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten, og at måleren er mindre enn 10 meter unna.
2. Start diasend<sup>®</sup>-mobilappen.
3. Gå til **LAST OPP** i den nederste menyen.   
(For mobile enheter med iOS: Velg Bluetooth som overføringsmetode).
4. Trykk **Start opplasting** i appen.
5. Slå på måleren.
6. Bluetooth-symbolet skal vises automatisk på måleren, og indikerer at Bluetooth er på. 
7. Velg måleren din når den vises i appen (NiproBGM). Når du blir bedt om å parkoble måleren, angir du de siste 6 sifrene i målerens serienummer, som er angitt på baksiden av måleren.

*Eksempel på serienummer:*



8. diasend<sup>®</sup>-appen kobles nå til måleren og starter synkronisering.
9. Synkronisere måleren i fremtiden: Start diasend<sup>®</sup>-appen, gå til **LAST OPP** og trykk **Start opplasting**. Slå på måleren. Synkroniseringen startes automatisk.

# Laste opp med diasend®

## Opplasting på Mac eller PC

---



1. Hent diasend® Uploader-appen for Mac eller PC. Du kan gjøre dette ved å logge på [diasend.com](https://diasend.com) og gå til fanen Tools.



2. Koble enheten din til datamaskinen og last opp dine data til diasend®-skyen.



3. Når dataene er lastet opp til skyen, oppdateres de automatisk på resultatkortet og i rapportene i mobilappen.