



# diasend<sup>®</sup> Mobile App

- ELSŐ LÉPÉSEK A FELTÖLTÉSHEZ

D0422v14F 2021-01-27  
A14030R1I-et támogatja


**glooko**

# Tartalom


---

*Előfordulhat, hogy az alábbi pácienskészülékek közül néhány nem érhető el az országában.*


---

-  Acon OnCall Extra Mobile


---

-  Acon OnCall Sure Sync


---

-  AgaMatrix WaveSense JAZZ Wireless


---

-  Ascensia Contour Care


---

-  Ascensia Contour Next


---

-  Ascensia Contour Next One


---

-  Ascensia Contour Plus One


---

-  ForaCare FORA 6 Connect


---

-  ForaCare FORA Diamond MINI DM30


---

-  ForaCare FORA GD40h


---

-  i-Sens Caresens Dual


---

-  i-Sens NoCoding1 Plus


---

-  i-Sens TEE2+


---

-  Menarini Glucofix Tech


---

-  Menarini GlucoMen areo 2K


---

-  Menarini GlucoMen areo


---

-  Nipro 4Sure Smart


---

-  Nipro 4Sure SmartDuo


---

-  NovoPen


---

-  Roche Accu-Chek Aviva Connect


---

-  Roche Accu-Chek Guide


---

-  Roche Accu-Chek Instant


---

-  Sanofi MyStar Plus

---

-  SOOIL Dana RS

---

-  Trividia TRUE METRIX AIR

*Nem találta meg az eszközét a listán?*

A feltöltéshez használja a diasend® Uploader alkalmazást a Mac-en vagy a PC számítógépén.

*(utolsó oldal)*

# Acon OnCall Extra Mobile

---




1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a mobileszközén és hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van-e.
2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
3. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.  (iOS-es mobileszközők esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli módszert.)
4. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
5. A mérőkészülékén tartsa lenyomva mindkét nyilat, amíg a kijelző bekapcsol. A kijelzőn a „bt” feliratnak kell megjelennie.
6. Válassza ki a mérőeszközét amint megjelenik az alkalmazáson. A mérőeszközének párosításakor írja be a mérőeszközének hátoldalán található 6 jegű sorozatszámot.
7. Ezután a diasend® alkalmazás hozzá tud csatlakozni a mérőeszközkhöz és elkezdheti a szinkronizálást.
8. A mérőeszközének jövőbeli szinkronizálásához Indítsa el a diasend® alkalmazást, nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot és nyomja meg az **Feltöltés indítása** gombot. A két nyíl együttes megnyomásával kapcsolja be a mérőkészülékét, a szinkronizálás automatikusan elindul.

## Acon OnCall Sure Sync

---




1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a mobileszközén és hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van-e.
2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
3. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.  (iOS-es mobileszközők esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli módszert.)
4. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
5. A mérőkészülékén tartsa lenyomva mindkét nyilat, amíg a kijelző bekapcsol. A kijelzőn a „bt” feliratnak kell megjelennie.
6. Válassza ki a mérőeszközét amint megjelenik az alkalmazáson. A mérőeszközének párosításakor írja be a mérőeszközének hátoldalán található 6 jegyű sorozatszámot.
7. Ezután a diasend® alkalmazás hozzá tud csatlakozni a mérőeszközhöz és elkezdheti a szinkronizálást.
8. A mérőeszközének jövőbeli szinkronizálásához Indítsa el a diasend® alkalmazást, nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot és nyomja meg az **Feltöltés indítása** gombot. A két nyíl együttes megnyomásával kapcsolja be a mérőkészülékét, a szinkronizálás automatikusan elindul.


# AgaMatrix WaveSens JAZZ Wireless

---



1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a mobileszközén és hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van-e.
2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
3. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.  (iOS-es mobileszközők esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli módszert.)
4. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
5. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva a gombot a mérőeszközén, amíg a Bluetooth ikon elkezd villogni.
6. Válassza ki a mérőeszközét amint megjelenik az alkalmazáson. Egy 6 számjegyből álló jelszó fog megjelenni a mérőeszközén.

*Példaábra a jelszóhoz:*

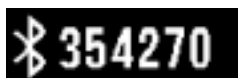

7. Írja be a számot az alkalmazásba.
8. A mérőeszköz pipával jelzi, ha a párosítás sikeres volt.

*Példaábra a pipához:*




9. A mérőeszköz és az alkalmazás egyaránt elkezdik a szinkronizálást.
10. A mérőeszközének jövőbeli szinkronizálásához Indítsa el a diasend® alkalmazást, nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot és nyomja meg az **Feltöltés indítása** gombot. Ha beindítja a mérőeszközét, a szinkronizálás automatikusan elindul.

# Ascensia Contour Care

---




1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobileszközön, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend<sup>®</sup> mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. Kapcsolja be a mérőeszközt. Tartsa benyomva mindkét nyílbillentyűt, amíg a Bluetooth szimbólum villogni nem kezd a kijelzőn.
7. Válassza ki a mérőeszközt, amikor megjelenik az alkalmazásban.
8. Erősítse meg a párosítási kérelmet a diasend<sup>®</sup> alkalmazásban a mérőeszköz kijelzőjén látható kód megadásával.
9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezd a szinkronizálást.
10. A mérőeszköz további szinkronizálása: Indítsa el a diasend<sup>®</sup> alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Amikor bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás automatikusan elkezdődik.

## Ascensia Contour Next

---



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobileszközön, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. Kapcsolja be a mérőeszközt. Tartsa benyomva mindkét nyílbillentyűt, amíg a Bluetooth szimbólum villogni nem kezd a kijelzőn.
7. Válassza ki a mérőeszközt, amikor megjelenik az alkalmazásban.
8. A diasend® alkalmazás csatlakozik a mérőeszközhöz.
9. Erősítse meg a párosítási kérelmet a diasend® alkalmazásban a mérőeszköz kijelzőjén látható kód megadásával.
10. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezd a szinkronizálást.
11. A mérőeszköz további szinkronizálása: Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Amikor bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás automatikusan elkezdődik.

# Ascensia Contour Next One

---



1. Kapcsolja KI a mérőeszközét.
2. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a mobileszközén és hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van-e.
3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
4. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.  (iOS-es mobileszközök esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli módszert.)
5. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
6. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva az **OK gombot** a mérőeszközén, amíg a tesztzalagport kék fénye elkezd villogni. A mérőeszköz sorozatszámát meg fog jelenni a kijelzőn.

*Példaábra a párosító módban lévő mérőeszközhöz:*



7. Válassza ki a mérőeszközének a sorozatszámát az alkalmazáson.
8. Ezután a diasend® alkalmazás hozzá tud csatlakozni a mérőeszközhöz.
9. Erősítse meg a párosítási kérelmét a diasend® alkalmazáson keresztül.
10. A mérőeszköz és az alkalmazás egyaránt elkezdik a szinkronizálást.
11. A mérőeszközének jövőbeli szinkronizálásához Indítsa el a diasend® alkalmazást, nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot és nyomja meg az **Feltöltés indítása** gombot. Ha beindítja a mérőeszközét, a szinkronizálás automatikusan elindul.



# Ascensia Contour Plus One

---



1. Kapcsolja KI a mérőeszközét.
2. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a mobileszközén és hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van-e.
3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
4. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.  (iOS-es mobileszközők esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli módszert.)
5. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
6. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva az **OK gombot** a mérőeszközén, amíg a tesztzalagport kék fénye elkezd villogni. A mérőeszköz sorozatszámát meg fog jelenni a kijelzőn.

*Példaábra a párosító módban lévő mérőeszközhöz:*



7. Válassza ki a mérőeszközének a sorozatszámát az alkalmazáson.
8. Ezután a diasend® alkalmazás hozzá tud csatlakozni a mérőeszközhöz.
9. Erősítse meg a párosítási kérelmét a diasend® alkalmazáson keresztül.
10. A mérőeszköz és az alkalmazás egyaránt elkezdik a szinkronizálást.
11. A mérőeszközének jövőbeli szinkronizálásához Indítsa el a diasend® alkalmazást, nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot és nyomja meg az **Feltöltés indítása** gombot. Ha beindítja a mérőeszközét, a szinkronizálás automatikusan elindul.

# ForaCare FORA 6 Connect

---




1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobileszközön, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend<sup>®</sup> mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. Nyomja meg a felfelé mutató nyíl gombot a mérőeszközön a Bluetooth-párosítás elindításához.
7. Válassza ki a mérőeszközt, amikor megjelenik az alkalmazásban.
8. Szükség esetén erősítse meg a párosítást a mobileszközön.
9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezd a szinkronizálást.
10. A mérőeszköz további szinkronizálása: Indítsa el a diasend<sup>®</sup> alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Amikor bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás automatikusan elkezdődik.

# ForaCare FORA Diamond MINI DM30

---




1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobilkészleten, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
(iOS rendszerű mobilkészletek esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. Kapcsolja be, majd kapcsolja ki a mérőeszközt a Bluetooth aktiválásához (a jelzőfény kéken fog villogni).
7. Válassza ki a mérőeszközt a diasend® alkalmazásban.
8. Szükség esetén erősítse meg a párosítási kérelmet a mobilkészleten.
9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezd a szinkronizálást.
10. A mérőeszköz további szinkronizálása: Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Kapcsolja be, majd kapcsolja ki a mérőeszközt a Bluetooth aktiválásához. A szinkronizálás automatikusan elkezdődik.

## ForaCare FORA GD40h

---




1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobilszközön, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
*(iOS rendszerű mobilszközök esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)*
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. A mérőeszközön nyomja lefelé a bal oldali csúszógombot, amíg a kék jelzőfény villogni nem kezd. Ezzel a Bluetooth aktiválva van.
7. A diasend® alkalmazásban válassza ki a mérőeszközt.
8. Szükség esetén erősítse meg a párosítási kérelmet a mobilszközön.
9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezd a szinkronizálást.
10. A mérőeszköz további szinkronizálása: Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. A mérőeszközön nyomja lefelé a csúszógombot a Bluetooth aktiválásához. A szinkronizálás automatikusan elkezdődik.

## i-Sens CareSens Dual

---




1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobileszközön, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. A Bluetooth-párosítás aktiválása a mérőeszközön:  
Tartsa benyomva a mérőeszköz **S** gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **SET** (Beállítás) felirat. Nyomja meg a nyíl gombot, amíg villogni nem kezd a **YES** (Igen) jelzés. Erősítse meg az **S** gomb megnyomásával. **bT** felirat jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a nyíl gombot, amíg villogni nem kezd a **Pair** (Párosítás) jelzés. Erősítse meg az **S** gomb megnyomásával. A **Pin** jelzés jelenik meg a kijelzőn.
7. A diasend® alkalmazásban válassza ki a mérőeszközt.
8. A mérőeszköz kijelzőjén megjelenik egy PIN-kód (6 számjegy). A párosítási kérelem megerősítéséhez írja be a PIN-kódot a diasend® alkalmazásban.
9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezd a szinkronizálást.
10. A mérőeszköz további szinkronizálása: Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Kapcsolja be a mérőeszközt, és a szinkronizálás automatikusan elkezdődik.\*

\*Csak akkor, ha vannak még nem továbbított adatok.


## i-Sens NoCoding1 Plus



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobileszközön, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
*(iOS rendszerű mobileszközök esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)*
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. A Bluetooth-párosítás aktiválása a mérőeszközön:  
Tartsa benyomva a mérőeszköz **BE/KI** gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **BEÁLLÍTÁS** felirat. Nyomja meg a nyíl gombot, amíg villogni nem kezd a **YES** (Igen) jelzés. Erősítse meg a **BE/KI** gomb megnyomásával. **bT** felirat jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a nyíl gombot, amíg villogni nem kezd a **Pair** (Párosítás) jelzés. Erősítse meg a **BE/KI** gomb megnyomásával. A **Pin** jelzés jelenik meg a kijelzőn.
7. A diasend® alkalmazásban válassza ki a mérőeszközt.
8. A mérőeszköz kijelzőjén megjelenik egy PIN-kód (6 számjegy). A párosítási kérelem megerősítéséhez írja be a PIN-kódot a diasend® alkalmazásban.
9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezd a szinkronizálást.
10. A mérőeszköz további szinkronizálása:  
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Kapcsolja be a mérőeszközt, és a szinkronizálás automatikusan elkezdődik.\*

*\*Csak akkor, ha vannak még nem továbbított adatok.*



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobilkészüléken, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
*(iOS rendszerű mobilkészülékek esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)*
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. A Bluetooth-párosítás aktiválása a mérőeszközön:  
Tartsa benyomva a mérőeszköz **BE/ KI** gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **BEÁLLÍTÁS** felirat. Nyomja meg a nyíl gombot, amíg villogni nem kezd a **YES** (Igen) jelzés. Erősítse meg a **BE/KI** gomb megnyomásával. **bT** felirat jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a nyíl gombot, amíg villogni nem kezd a **Pair** (Párosítás) jelzés. Erősítse meg a **BE/KI** gomb megnyomásával. A **Pin** jelzés jelenik meg a kijelzőn.
7. A diasend® alkalmazásban válassza ki a mérőeszközt.
8. A mérőeszköz kijelzőjén megjelenik egy PIN-kód (6 számjegy). A párosítási kérelem megerősítéséhez írja be a PIN-kódot a diasend® alkalmazásban.
9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezd a szinkronizálást.
10. A mérőeszköz további szinkronizálása:  
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Kapcsolja be a mérőeszközt, és a szinkronizálás automatikusan elkezdődik.\*

*\*Csak akkor, ha vannak még nem továbbított adatok.*



# Menarini Glucofix Tech

(Csak Androiddal)

---



1. Ellenőrizze, hogy az NFC aktiválva van-e mobileszközén és a mérőeszközén egyaránt.
2. Kapcsolja KI a mérőeszközét és indítsa be a diasend® mobilalkalmazást. Tartsa a mérőeszközt a mobileszközének NFC chipjéhez. (Az NFC rendszerint a mobileszközének hátoldalán található)

**Az NFC engedélyezéséhez a mérőeszközén, kövesse az alábbi lépéseket:**

1. Kapcsolja KI a mérőeszközét.
2. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva a **BE/KI gombokat**, amíg a “Set“ (beállítás) gomb megjelenik a kijelzőn.
3. Addig nyomja a **lefelé gombot**, amíg az “N” elkezd villogni.
4. Válassza ki ezt a funkciót a **BE/KI gombok** megnyomásával.
5. Nyomja meg egyszer a **lefelé gombot**, ezután a “On“ (BE) gomb elkezd villogni.
6. Erősítse meg a **BE/KI gombok** egyszeri megnyomásával.
7. Kapcsolja KI a mérőeszközét.





# Menarini GlucoMen areo 2K



1. Ellenőrizze, hogy az NFC aktiválva van-e mobil eszközén és a mérőeszközén egyaránt.
2. Kapcsolja KI a mérőeszközét és indítsa be a diasend® mobilalkalmazást. Tartsa a mérőeszközt a mobil eszközének NFC chipjéhez. (Az NFC rendszerint a mobil eszközének hátoldalán található)

*Megjegyzés: Az iOS rendszer felhasználói esetében ez a mérőeszköz csak akkor kompatibilis NFC-n keresztül, ha a mérőeszközt 2018-ban vagy később gyártották.*

## **Az NFC engedélyezéséhez a mérőeszközén, kövesse az alábbi lépéseket:**

1. Kapcsolja KI a mérőeszközét.
2. A mérőeszköze típusától függően: Lépjen be a beállítások menübe az **ON/OFF** gomb benyomva tartásával, vagy az **ON/OFF** gomb és a **felfelé nyíl** gomb egyidejű benyomva tartásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „set“.
3. Addig nyomja a **lefelé gombot**, amíg az “N” elkezd villogni.
4. Válassza ki ezt a funkciót a **BE/KI gombok** megnyomásával.
5. Nyomja meg egyszer a **lefelé gombot**, ezután a “On” (BE) gomb elkezd villogni.
6. Erősítse meg a **BE/KI gombok** egyszeri megnyomásával.
7. Kapcsolja KI a mérőeszközét.



# Menarini GlucoMen areo

(Csak Androiddal)

---



1. Ellenőrizze, hogy az NFC aktiválva van-e mobilszközén és a mérőszközén egyaránt.
2. Kapcsolja KI a mérőszközét és indítsa be a diasend® mobilalkalmazást. Tartsa a mérőszközt a mobilszközének NFC chipjéhez. (Az NFC rendszerint a mobilszközének hátoldalán található)


**Az NFC engedélyezéséhez a mérőszközén, kövesse az alábbi lépéseket:**

1. Kapcsolja KI a mérőszközét.
2. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva a **BE/KI gombokat**, amíg a “Set” (beállítás) gomb megjelenik a kijelzőn.
3. Addig nyomja a **lefelé gombot**, amíg az “N” elkezd villogni.
4. Válassza ki ezt a funkciót a **BE/KI gombok** megnyomásával.
5. Nyomja meg egyszer a **lefelé gombot**, ezután a “On” (BE) gomb elkezd villogni.
6. Erősítse meg a **BE/KI gombok** egyszeri megnyomásával.
7. Kapcsolja KI a mérőszközét.

## Nipro 4Sure Smart

---




1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobileszközön, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend<sup>®</sup> mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. Kapcsolja be a mérőeszközt. A Bluetooth automatikusan bekapcsolódik.
7. Az alkalmazásban válassza ki a mérőeszközt.
8. Szükség esetén erősítse meg a párosítási kérelmet a mobileszközön.
9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a szinkronizálást.
10. A mérőeszköz további szinkronizálása: Indítsa el a diasend<sup>®</sup> alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Amikor bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás automatikusan elkezdődik.

## Nipro 4Sure SmartDuo

---



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobileszközön, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend<sup>®</sup> mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. Kapcsolja be az eszközt. A Bluetooth automatikusan bekapcsolódik.
7. Az alkalmazásban válassza ki a mérőeszközt.
8. Szükség esetén erősítse meg a párosítási kérelmet a mobileszközön.
9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a szinkronizálást.
10. A mérőeszköz további szinkronizálása: Indítsa el a diasend<sup>®</sup> alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Amikor bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás automatikusan elkezdődik.




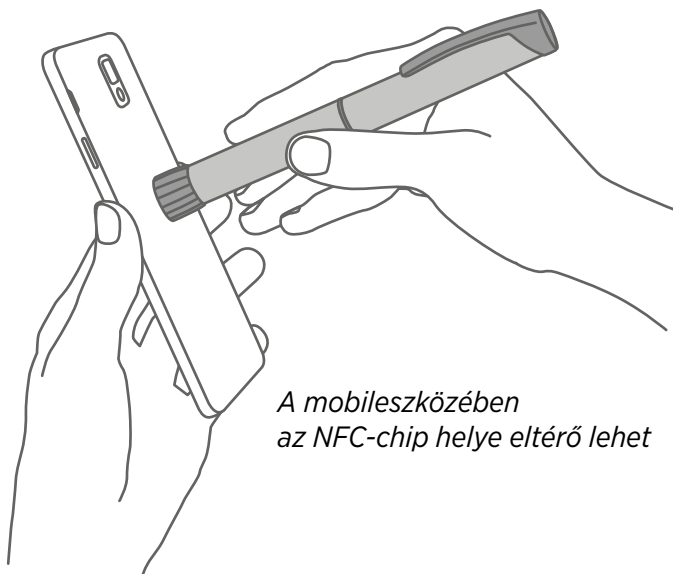
# NovoPen<sup>®</sup> 6

## NovoPen Echo<sup>®</sup> Plus

---



1. Ellenőrizze, hogy az NFC engedélyezve van-e a mobil eszközön.
2. Indítsa el a diasend<sup>®</sup> mobilalkalmazást.
3. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.  (iOS-es mobil eszközök esetén: Kérjük, válassza az NFC átviteli módszert.)
4. Tartsa a NovoPen<sup>®</sup>-t a mobil eszközének NFC chipjére.




*A mobil eszközében az NFC-chip helye eltérő lehet*

# Roche Accu-Chek Aviva Connect




## Pármérő


1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a mobileszközén és hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van-e.
2. Az **OK** gomb megnyomásával kapcsolja be a mérőeszközt.
3. Válassza ki a **Settings**-et és nyomja meg az **OK** gombot.

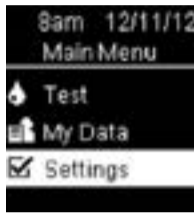



4. Görgessen le a **Wireless** kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot.

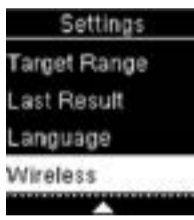

5. Jelölje be, hogy **Yes** és nyomja meg az **OK** gombot.

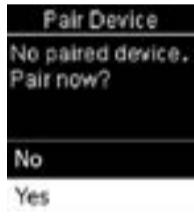

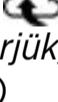
6. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
7. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.  (iOS-es mobileszközők esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli módszert.)
8. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
9. Válassza ki a mérőeszközét amint megjelenik az alkalmazáson. A mérőeszközének párosításakor írja be a kijelzőjén látható 6 darab számjegyet.

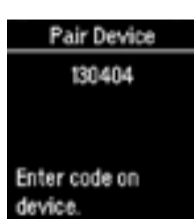


## Adatátvitel


Ha szinkronizálni szeretné a mérőeszközének előzményeiben található összes eredményt, adatátvitelt is kezdeményezhet. Így a mérőeszközén tárolt összes eredményt továbbítja a diasend®-nek.

Menjen vissza a Főmenübe vagy kapcsolja be a mérőeszközt az **OK** gomb megnyomásával.


10. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
11. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben. 
12. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
13. Jelölje be, hogy **My Data** és nyomja meg az **OK** gombot.

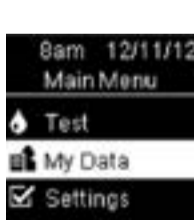

14. Jelölje be, hogy **Data Transfer** és nyomja meg az **OK** gombot.

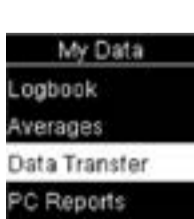

15. Jelölje be, hogy **Wireless** és nyomja meg az **OK** gombot.

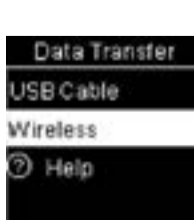


16. Ezután a mérőeszköze és a diasend® alkalmazás elkezdhetik a szinkronizálást.

# Roche Accu-Chek Guide




## Pármérő


1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a mobileszközén és hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van-e.
2. Az **OK** gomb megnyomásával kapcsolja be a mérőeszközt.
3. Válassza ki a **Settings**-et és nyomja meg az **OK** gombot.

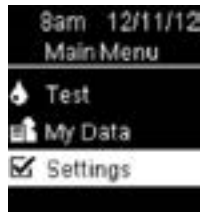


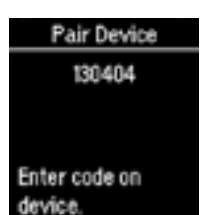
4. Görgessen le a **Wireless** kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot.

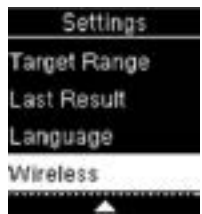

5. Jelölje be, hogy **Yes** és nyomja meg az **OK** gombot.

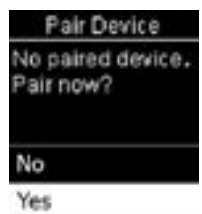


6. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
7. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.  (iOS-es mobileszközők esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli módszert.)
8. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
9. Válassza ki a mérőeszközét amint megjelenik az alkalmazáson. A mérőeszközének párosításakor írja be a kijelzőjén látható 6 darab számjegyet.




## Adatátvitel


Ha szinkronizálni szeretné a mérőeszközének előzményeiben található összes eredményt, adatátvitelt is kezdeményezhet. Így a mérőeszközén tárolt összes eredményt továbbítja a diasend®-nek.

Menjen vissza a Főmenübe vagy kapcsolja be a mérőeszközt az **OK** gomb megnyomásával.

10. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
11. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben. 
12. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
13. Jelölje be, hogy **My Data** és nyomja meg az **OK** gombot.

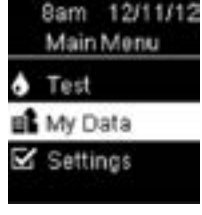

14. Jelölje be, hogy **Data Transfer** és nyomja meg az **OK** gombot.

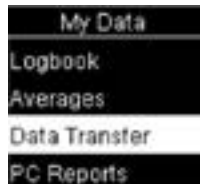

15. Jelölje be, hogy **Wireless** és nyomja meg az **OK** gombot.




16. Ezután a mérőeszköze és a diasend® alkalmazás elkezdhetik a szinkronizálást.

# Roche Accu-Chek Instant



1. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobileszközén, valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van.
2. Ha a mérőeszköz nincs bekapcsolva, akkor tartsa nyomva a mérőeszköz gombját, amíg meg nem jelenik a Bluetooth szimbólum. A párosítás és a vezeték nélküli kapcsolat szimbóluma egyaránt megjelenik és villog.



3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
4. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.   
(iOS-es mobileszközök esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli módszert.)
5. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
6. Válassza ki a mérőeszközét, amint megjelenik az alkalmazásban. Amikor a rendszer kéri a mérőeszköz párosítására, adja meg a mérőeszköz hátulján található 6 jegyű PIN-kódot.

*Példa a PIN-kódra:*




7. Ezután a diasend® alkalmazás csatlakozni tud a mérőeszközhöz, és elkezdheti a szinkronizálást.
8. A mérőeszköz további szinkronizálása: Indítsa el a diasend® alkalmazást, nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Ha bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás automatikusan elindul.




# Sanofi MyStar Plus

---



1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a mobileszközén és hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van-e.
2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
3. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.  (iOS-es mobileszközök esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli módszert.)
4. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
5. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva a gombot a mérőeszközén, amíg a Bluetooth ikon elkezd villogni.
6. Válassza ki a mérőeszközét amint megjelenik az alkalmazáson. Egy 6 számjegyből álló jelszó fog megjelenni a mérőeszközén.

*Példaábra a jelszóhoz:*

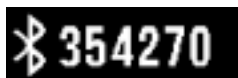

7. Írja be a számot az alkalmazásba.
8. A mérőeszköz pipával jelzi, ha a párosítás sikeres volt.

*Példaábra a pipához:*




9. A mérőeszköz és az alkalmazás egyaránt elkezdik a szinkronizálást.
10. A mérőeszközének jövőbeli szinkronizálásához Indítsa el a diasend® alkalmazást, nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot és nyomja meg az **Feltöltés indítása** gombot. Ha beindítja a mérőeszközét, a szinkronizálás automatikusan elindul.

## SOOIL Dana RS

---



1. Kapcsolja ki a szivattyút.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a mobilszközön, valamint hogy a szivattyú 10 méteres távolságon belül van.
3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
4. Lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez az alsó menüben.   
(iOS rendszerű mobilszközök esetén: Válassza a Bluetooth átviteli módot.)
5. Nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot az alkalmazásban.
6. Kapcsolja be a szivattyút. A Bluetooth automatikusan bekapcsolódik.
7. Az alkalmazásban válassza ki a szivattyút.
8. Szükség esetén erősítse meg a párosítási kérelmet a mobilszközön.
9. A szivattyú és az alkalmazás elkezdi a szinkronizálást.
10. A szivattyú további szinkronizálása: Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen a **FELTÖLTÉS** elemhez, és nyomja meg a **Feltöltés indítása** gombot. Amikor bekapcsolja a szivattyút, a szinkronizálás automatikusan elkezdődik.

# Trividia TRUE METRIX AIR

---



1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a mobileszközén és hogy a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül van-e.
2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.
3. Nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot az alsó menüben.  (iOS-es mobileszközők esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli módszert.)
4. Nyomja meg az alkalmazás **Feltöltés indítása** gombját.
5. Kapcsolja be a mérőeszközt.
6. A Bluetooth szimbólum automatikusan meg fog jelenni a mérőeszközén, ami azt jelzi, hogy a Bluetooth be van kapcsolva. 
7. Válassza ki a mérőeszközét amint megjelenik az alkalmazáson (NiproBGM). A mérőeszközének párosításakor írja be a mérőeszközének hátoldalán található 6 jegyű sorozatszámot.

*Példaábra a sorozatszámhoz:*



8. Ezután a diasend® alkalmazás hozzá tud csatlakozni a mérőeszközhöz és elkezdheti a szinkronizálást.
9. A mérőeszközének jövőbeli szinkronizálásához Indítsa el a diasend® alkalmazást, nyissa meg a **FELTÖLTÉS** lapot és nyomja meg az **Feltöltés indítása** gombot. Ha beindítja a mérőeszközét, a szinkronizálás automatikusan elindul.

# Feltöltés a diasend® segítségével Uploader Mac vagy PC számítógéphez.

---



1. Töltse le a diasend® Uploader alkalmazást a Mac vagy PC számítógépére. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy bejelentkezik a diasend.com-on keresztül és megnyitja az Eszközök fület.



2. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez, és töltse fel adatait a diasend®-felhőbe.



3. A felhőbe került adatok automatikusan frissülnek a mobilalkalmazásán található eredménylapon és jelentésekben.