



diasend[®] Mobile App


- STRUČNÝ NÁVOD NA NAHRÁVANIE


Obsah


Upozorňujeme, že niektoré diabetické zariadenia nemusia byť dostupné na vašom trhu.


-  Acon OnCall Extra Mobile


-  Acon OnCall Sure Sync


-  AgaMatrix WaveSense JAZZ Wireless


-  Ascensia Contour Care


-  Ascensia Contour Next


-  Ascensia Contour Next One


-  Ascensia Contour Plus One


-  ForaCare FORA 6 Connect


-  ForaCare FORA Diamond MINI DM30


-  ForaCare FORA GD40h


-  i-Sens Caresens Dual


-  i-Sens NoCoding1 Plus


-  i-Sens TEE2+


-  Menarini Glucofix Tech


-  Menarini GlucoMen areo 2K


-  Menarini GlucoMen areo


-  Nipro 4Sure Smart


-  Nipro 4Sure SmartDuo


-  NovoPen


-  Roche Accu-Chek Aviva Connect

-  Roche Accu-Chek Guide

-  Roche Accu-Chek Instant

-  Sanofi MyStar Plus

-  SOOIL Dana RS

-  Trividia TRUE METRIX AIR


Nenašli ste vaše zariadenie na zozname?

Nahrávanie pomocou diasend®
Uploader na vašom Mac alebo PC

(posledná strana)


Acon OnCall Extra Mobile



1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení máte aktivovaný bluetooth a že váš glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10 metrov.
2. Spustíte mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ).  (Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob prenosu)
4. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
5. Na vašom glukomere stlačte a podržte oba klávesy so šípkou, kým sa nezapne displej. Na displeji by sa mali zobraziť písmená „bt“.
6. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii. Po výzve na spárovanie vášho glukomera zadajte 6 číslic sériového čísla glukomera, ktoré sa nachádza na zadnej časti vášho glukomera.
7. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí na glukomer a začne synchronizácia.
8. Keď chcete synchronizovať váš glukomer v budúcnosti: Spustíte aplikáciu diasend®, prejdite do položky **UPLOAD** (NAHRAŤ) a stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie). Stlačením oboch klávesov so šípkou zapnete váš glukomer a synchronizácia sa spustí automaticky.


Acon OnCall Sure Sync




1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení máte aktivovaný bluetooth a že váš glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10 metrov.
2. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ).  (Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob prenosu)
4. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
5. Na vašom glukomere stlačte a podržte oba klávesy so šípkou, kým sa nezapne displej. Na displeji by sa mali zobrazíť písmená „bt“.
6. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii. Po výzve na spárovanie vášho glukomera zadajte 6 číslic sériového čísla glukomera, ktoré sa nachádza na zadnej časti vášho glukomera.
7. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí na glukomer a začne synchronizácia.
8. Keď chcete synchronizovať váš glukomer v budúcnosti: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite do položky **UPLOAD** (NAHRAŤ) a stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie). Stlačením oboch klávesov so šípkou zapnete váš glukomer a synchronizácia sa spustí automaticky.

AgaMatrix WaveSens JAZZ Wireless



1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení máte aktivovaný bluetooth a že váš glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10 metrov.
2. Spustíte mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ).  (Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob prenosu)
4. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
5. Na vašom merači stlačte a podržte tlačidlo glukomera, kým nezačne blikáť ikona bluetooth.
6. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii. Na glukomere sa objaví 6-miestne číslicové heslo.

Príklad obrázka s číslicovým heslom:

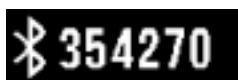

7. Do aplikácie vpíšte toto číslo.
8. Na merači sa zobrazí kontrolný symbol, ktorý oznamuje, že párovanie bolo úspešné.


Príklad obrázka s kontrolným symbolom:



9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Keď chcete synchronizovať váš glukomer v budúcnosti: Spustíte aplikáciu diasend®, prejdite do položky **UPLOAD** (NAHRAŤ) a stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie). Zapnite váš glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.


Ascensia Contour Care



1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Zapnite glukomer. Stlačte a podržte obe tlačidlá so šípkami, kým nezačne na displeji blikať symbol Bluetooth.
7. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii.
8. Pomocou kódu na displeji glukomera potvrdíte v aplikácii diasend® žiadosť o spárovanie.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Zapnite glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.


Ascensia Contour Next



1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Zapnite glukomer. Stlačte a podržte obe tlačidlá so šípkami, kým nezačne na displeji blikať symbol Bluetooth.
7. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii.
8. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí ku glukomeru.
9. Pomocou kódu na displeji glukomera potvrdíte v aplikácii diasend® žiadosť o spárovanie.
10. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
11. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Zapnite glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.

Ascensia Contour Next One



1. VYPNITE váš glukomer.
2. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení máte aktivovaný bluetooth a že váš glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ).  (Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob prenosu)
5. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
6. Na vašom glukomere stlačte a neuvolňujte **tlačidlo OK**, kým nezačne blikať modré svetlo testovacieho prúžku. Na displeji sa zobrazí sériové číslo glukomera.


Príklad obrázka s glukomerom v režime spárovania:



7. V aplikácii vyberte sériové číslo vášho glukomera.
8. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí na glukomer.
9. V aplikácii diasend® potvrdte žiadosť o spárovanie.
10. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
11. Keď chcete synchronizovať váš glukomer v budúcnosti: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite do položky **UPLOAD** (NAHRAŤ) a stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie). Zapnite váš glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.

Ascensia Contour Plus One



1. VYPNITE váš glukomer.
2. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení máte aktivovaný bluetooth a že váš glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ).  (Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob prenosu)
5. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
6. Na vašom glukomere stlačte a neuvolňujte **tlačidlo OK**, kým nezačne blikať modré svetlo testovacieho prúžku. Na displeji sa zobrazí sériové číslo glukomera.


Príklad obrázka s glukomerom v režime spárovania:



7. V aplikácii vyberte sériové číslo vášho glukomera.
8. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí na glukomer.
9. V aplikácii diasend® potvrdte žiadosť o spárovanie.
10. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
11. Keď chcete synchronizovať váš glukomer v budúcnosti: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite do položky **UPLOAD** (NAHRAŤ) a stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie). Zapnite váš glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.


ForaCare FORA 6 Connect



1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Stlačením tlačidla so šípkou nahor na glukomere spustíte párovanie cez Bluetooth.
7. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii.
8. V prípade potreby potvrdte párovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Zapnite glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.


ForaCare FORA Diamond MINI DM30



1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Glukomer zapnite a potom ho znova vypnite, aby ste aktivovali Bluetooth (svetlo bude blikať namodro).
7. V aplikácii diasend® vyberte glukomer.
8. V prípade potreby potvrdte žiadosť o spárovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Glukomer zapnite a potom ho znova vypnite, aby ste aktivovali Bluetooth. Synchronizácia sa spustí automaticky.


ForaCare FORA GD40h



1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustíte mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Na glukomere zatlačte posuvné tlačidlo naľavo nadol, kým nezačne svetlo blikať namodro. Bluetooth je teraz aktívne.
7. V aplikácii diasend® vyberte svoj glukomer.
8. V prípade potreby potvrdte žiadosť o spárovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustíte aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Na glukomere zatlačte posuvné tlačidlo nadol, aby ste aktivovali Bluetooth. Synchronizácia sa spustí automaticky.

i-Sens CareSens Dual




1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Na aktiváciu párovania cez Bluetooth v glukomere:
Na glukomere stlačte a podržte tlačidlo **S**, kým sa na displeji nezobrazí správa **SET** (NASTAVIŤ). Stlačte tlačidlo so šípkou, kým nezačne blikať možnosť **YES** (ÁNO). Potvrďte stlačením tlačidla **S**. Na displeji sa zobrazí hlásenie **bT**. Stlačte tlačidlo so šípkou, kým nezačne blikať možnosť **Pair** (Spárovať). Potvrďte stlačením tlačidla **S**. Na displeji sa zobrazí správa **Pin**.
7. V aplikácii diasend® vyberte svoj glukomer.
8. Na displeji glukomera sa zobrazí číslo PIN (6-miestne). V aplikácii diasend® zadajte číslo PIN a potvrďte žiadosť o spárovanie.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Zapnite glukomer a synchronizácia sa začne automaticky*.

*Len ak existujú neprenesené údaje.


i-Sens NoCoding1 Plus



1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Na aktiváciu párovania cez Bluetooth v glukomere:
Na glukomere stlačte a podržte tlačidlo **ON/OFF** (ZAP./VYP.), kým sa na displeji nezobrazí správa **SET** (NASTAVIŤ). Stlačte tlačidlo so šípkou, kým nezačne blikať možnosť **YES** (ÁNO). Potvrďte stlačením tlačidla **ON/OFF** (ZAP./VYP.). Na displeji sa zobrazí hlásenie **bT**. Stlačte tlačidlo so šípkou, kým nezačne blikať možnosť **Pair** (Spárovať). Potvrďte stlačením tlačidla **ON/OFF** (ZAP./VYP.). Na displeji sa zobrazí správa **Pin**.
7. V aplikácii diasend® vyberte svoj glukomer.
8. Na displeji glukomera sa zobrazí číslo PIN (6-miestne). V aplikácii diasend® zadajte číslo PIN a potvrdte žiadosť o spárovanie.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Zapnite glukomer a synchronizácia sa začne automaticky*.

*Len ak existujú neprenesené údaje.



1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Na aktiváciu párovania cez Bluetooth v glukomere:
Na glukomere stlačte a podržte tlačidlo **ON/OFF** (ZAP./VYP.), kým sa na displeji nezobrazí správa **SET** (NASTAVIŤ). Stlačte tlačidlo so šípkou, kým nezačne blikáť možnosť **YES** (ÁNO). Potvrďte stlačením tlačidla **ON/OFF** (ZAP./VYP.). Na displeji sa zobrazí hlásenie **bT**. Stlačte tlačidlo so šípkou, kým nezačne blikáť možnosť **Pair** (Spárovať). Potvrďte stlačením tlačidla **ON/OFF** (ZAP./VYP.). Na displeji sa zobrazí správa **Pin**.
7. V aplikácii diasend® vyberte svoj glukomer.
8. Na displeji glukomera sa zobrazí číslo PIN (6-miestne). V aplikácii diasend® zadajte číslo PIN a potvrďte žiadosť o spárovanie.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Zapnite glukomer a synchronizácia sa začne automaticky*.

*Len ak existujú neprenesené údaje.



Menarini Glucofix Tech

(Len Android)



1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení je aktivovaná komunikácia NFC a glukomer.
2. Vypnite váš glukomer a spustite mobilnú aplikáciu diasend®. Podržte glukomer pri čipe komunikácie NFC na svojom mobilnom zariadení. (Čip komunikácie NFC je spravidla umiestnený na zadnej časti mobilného zariadenia)

Na vašom glukomere aktivujte komunikáciu NFC nasledovnými krokmi:

1. VYPNITE váš glukomer.
2. Stlačte a podržte **tlačidlo ON/OFF**, kým sa na displeji neukáže „set“.
3. Stlačte **tlačidlo so šípkou dole**, kým nezačne blikať „N“.
4. Túto funkciu vyberte stlačením **tlačidla ON/OFF**.
5. Stlačte jedenkrát **tlačidlo so šípkou dole**. Začne blikať „On“.
6. Potvrďte jedným stlačením **tlačidla ON/OFF**.
7. VYPNITE váš glukomer.



Menarini GlucoMen areo 2K



1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení je aktivovaná komunikácia NFC a glukomer.
2. Vypnite váš glukomer a spustite mobilnú aplikáciu diasend®. Podržte glukomer pri čipe komunikácie NFC na svojom mobilnom zariadení. (Čip komunikácie NFC je spravidla umiestnený na zadnej časti mobilného zariadenia)

Vezmite na vedomie: V prípade systémov iOS je tento glukomer kompatibilný len prostredníctvom NFC, ak bol glukomer vyrobený v roku 2018 a neskôr.

Na vašom glukomere aktivujte komunikáciu NFC nasledovnými krokmi:

1. **VYPNITE** váš glukomer.
2. V závislosti od verzie vášho glukomera: Prejdite do ponuky nastavení stlačením a podržaním tlačidla **ON/OFF** (ZAP./VYP.) alebo tlačidla **ON/OFF** (ZAP./VYP.) a **šípky** súčasne, kým sa na displeji nezobrazí správa „**set**“.
3. Stlačte **tlačidlo so šípkou dole**, kým nezačne blikať „N“.
4. Túto funkciu vyberte stlačením **tlačidla ON/OFF**.
5. Stlačte jedenkrát **tlačidlo so šípkou dole**. Začne blikať „On“.
6. Potvrďte jedným stlačením **tlačidla ON/OFF**.
7. **VYPNITE** váš glukomer.



Menarini GlucoMen areo

(Len Android)




1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení je aktivovaná komunikácia NFC a glukomer.
2. Vypnite váš glukomer a spustíte mobilnú aplikáciu diasend®. Podržte glukomer pri čipe komunikácie NFC na svojom mobilnom zariadení. (Čip komunikácie NFC je spravidla umiestnený na zadnej časti mobilného zariadenia)

Na vašom glukomere aktivujte komunikáciu NFC nasledovnými krokmi:

1. VYPNITE váš glukomer.
2. Stlačte a podržte **tlačidlo ON/OFF**, kým sa na displeji neukáže „set“.
3. Stlačte **tlačidlo so šípkou dole**, kým nezačne blikať „N“.
4. Túto funkciu vyberte stlačením **tlačidla ON/OFF**.
5. Stlačte jedenkrát **tlačidlo so šípkou dole**. Začne blikať „On“.
6. Potvrďte jedným stlačením **tlačidla ON/OFF**.
7. VYPNITE váš glukomer.


Nipro 4Sure Smart



1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Zapnite glukomer. Bluetooth sa automaticky aktivuje.
7. V aplikácii vyberte svoj glukomer.
8. V prípade potreby potvrdte žiadosť o spárovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Zapnite glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.

Nipro 4Sure SmartDuo




1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Zapnite zariadenie. Bluetooth sa automaticky aktivuje.
7. V aplikácii vyberte svoj glukomer.
8. V prípade potreby potvrdte žiadosť o spárovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Zapnite glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.




NovoPen[®] 6

NovoPen Echo[®] Plus



1. Uistite sa, že je na vašom mobilnom zariadení aktivovaná komunikácia NFC.
2. Spustíte mobilnú aplikáciu diasend[®].
3. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ).  (Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte NFC ako spôsob prenosu).
4. Podržte NovoPen[®] pri čipe komunikácie NFC na svojom mobilnom zariadení.

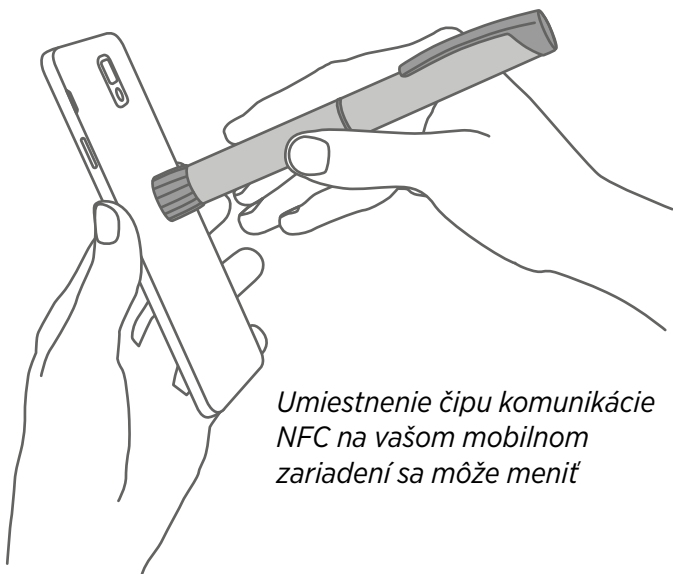


Umiestnenie čipu komunikácie NFC na vašom mobilnom zariadení sa môže meniť

Roche Accu-Chek Aviva Connect



Spárujte glukomer


1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení máte aktivovaný bluetooth a že váš glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10 metrov.
2. Zapnite glukomer stlačením **OK**.
3. Vyberte položku **Settings** (Nastavenia) a stlačte **OK**.

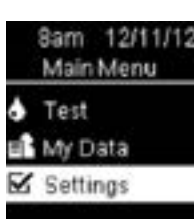


4. Posúvajte sa nadol a vyberte položku **Wireless** (Bezdrôtový) a stlačte **OK**.



5. Vyberte možnosť **Yes** (Áno) a stlačte **OK**.

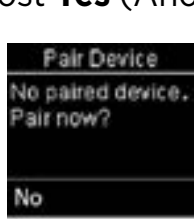

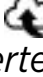
6. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
7. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ).  (Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob prenosu)
8. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
9. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii. Po výzve na spárovanie vášho glukomeru, zadajte 6 číslic uvedených na vašom glukomere.




Prenos údajov


Ak chcete synchronizovať všetky načítané hodnoty v histórii vášho glukomeru, môžete vykonať prenos údajov. Táto operácia odošle všetky načítané hodnoty uložené vo vašom glukomere do diasend®.

Stláčajte tlačidlo späť, kým sa nedostanete do hlavnejponuky alebo zapnite glukomer stlačením **OK**.

10. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
11. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ). 
12. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
13. Vyberte položku **My Data** (Moje údaje) a stlačte **OK**.

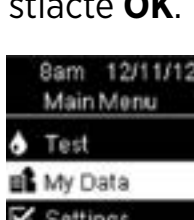

14. Vyberte položku **Data Transfer** (Prenos údajov) a stlačte **OK**.

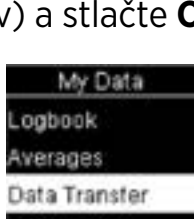

15. Vyberte položku **Wireless** (Bezdrôtový) a stlačte **OK**.




16. Teraz sa spustí synchronizácia glukomeru a aplikácia diasend®.

Roche Accu-Chek Guide



Spárujte glukomer


1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení máte aktivovaný bluetooth a že váš glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10 metrov.
2. Zapnite glukomer stlačením **OK**.
3. Vyberte položku **Settings** (Nastavenia) a stlačte **OK**.

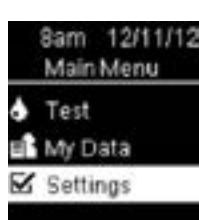


4. Posúvajte sa nadol a vyberte položku **Wireless** (Bezdrôtový) a stlačte **OK**.



5. Vyberte možnosť **Yes** (Áno) a stlačte **OK**.

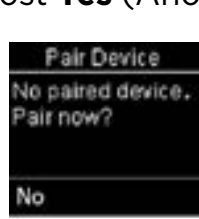


6. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
7. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ).  (Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob prenosu)
8. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
9. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii. Po výzve na spárovanie vášho glukomeru, zadajte 6 číslic uvedených na vašom glukomere.




Prenos údajov


Ak chcete synchronizovať všetky načítané hodnoty v histórii vášho glukomeru, môžete vykonať prenos údajov. Táto operácia odošle všetky načítané hodnoty uložené vo vašom glukomere do diasend®.

Stláčajte tlačidlo späť, kým sa nedostanete do hlavnejponuky alebo zapnite glukomer stlačením **OK**.


10. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
11. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ). 
12. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
13. Vyberte položku **My Data** (Moje údaje) a stlačte **OK**.

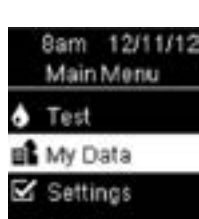

14. Vyberte položku **Data Transfer** (Prenos údajov) a stlačte **OK**.

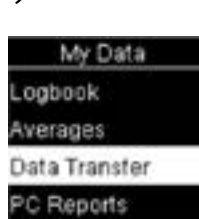

15. Vyberte položku **Wireless** (Bezdrôtový) a stlačte **OK**.

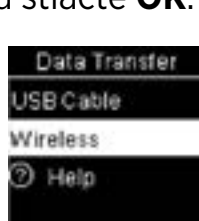


16. Teraz sa spustí synchronizácia glukomeru a aplikácia diasend®.

Roche Accu-Chek Instant



1. Uistite sa, že máte vo svojom mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
2. Keď je glukomer vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo glukomera, kým sa nezobrazí symbol Bluetooth. Zobrazia sa a blikajú symboly párovania a bezdrôtového pripojenia.



3. Spustíte mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob prenosu).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii. Keď sa zobrazí výzva na spárovanie vášho glukomera, zadajte 6-ciferný PIN kód, ktorý nájdete na zadnej strane glukomera.


Príklad obrázka s PIN kódom:




7. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí ku glukomeru a začne sa synchronizácia.
8. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať glukomer, postupujte takto: Spustíte aplikáciu diasend®, prejdite na položky **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Zapnite glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.

Sanofi MyStar Plus



1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení máte aktivovaný bluetooth a že váš glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10 metrov.
2. Spustíte mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob prenosu).
4. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
5. Na vašom merači stlačte a podržte tlačidlo glukomera, kým nezačne blikať ikona bluetooth.
6. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii. Na glukomere sa objaví 6-miestne číslicové heslo.

Príklad obrázka s číslicovým heslom:

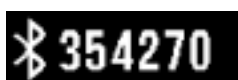

7. Do aplikácie vpíšte toto číslo.
8. Na merači sa zobrazí kontrolný symbol, ktorý oznamuje, že párovanie bolo úspešné.


Príklad obrázka s kontrolným symbolom:



9. Spustí sa synchronizácia glukomera a aplikácie.
10. Keď chcete synchronizovať váš glukomer v budúcnosti: Spustíte aplikáciu diasend®, prejdite do položky **UPLOAD** (NAHRAŤ) a stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie). Zapnite váš glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.



SOOIL Dana RS



1. Vypnite čerpadlo.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš pumpu nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ). 
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie).
6. Zapnite čerpadlo. Bluetooth sa automaticky aktivuje.
7. V aplikácii vyberte svoj pumpu.
8. V prípade potreby potvrdte žiadosť o spárovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia pumpa a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať pumpu, postupujte takto: Spustite aplikáciu diasend®, prejdite na položku **UPLOAD** (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo **Start Upload** (Spustiť načítanie). Zapnite čerpadlo a synchronizácia sa začne automaticky.

Trividia TRUE METRIX AIR



1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení máte aktivovaný bluetooth a že váš glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10 metrov.
2. Spustíte mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite na **UPLOAD** (NAHRAŤ).  (Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob prenosu)
4. V aplikácii stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie).
5. Zapnite váš glukomer.
6. Na vašom glukomere sa automaticky objaví symbol bluetooth, čo znamená, že je bluetooth zapnutý. 
7. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v aplikácii (NiproBGM). Po výzve na spárovanie vášho glukomera zadajte 6 číslic sériového čísla glukomera, ktoré sa nachádza na zadnej časti vášho glukomera.

Príklad obrázka sériového čísla:



8. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí na glukomer a začne synchronizácia.
9. Keď chcete synchronizovať váš glukomer v budúcnosti: Spustíte aplikáciu diasend®, prejdite do položky **UPLOAD** (NAHRAŤ) a stlačte **Start Upload** (Spustiť nahrávanie). Zapnite váš glukomer a synchronizácia sa začne automaticky.

Nahrávajte pomocou diasend® Uploader na vašom Mac alebo PC



1. Aplikácia diasend® Uploader je k dispozícii pre počítače Mac alebo PC. Aplikáciu si môžete prevziať zo záložky Tools (Nástroje) na stránke diasend.com.



2. Pripojte svoje zariadenie k počítaču a načítajte svoje údaje do cloudovej služby diasend®.



3. Keď sa nachádzate v prostredí cloudu, údaje sa automaticky načítajú na vašu Scorecard a Reports vo vašej mobilnej aplikácii.