

diasend[®] Mobile App

– GUÍA RÁPIDA DE CARGA

D0422v5F 2021-01-27
para A1403OR11

glooko

Índice

Tenga en cuenta que algunos de los siguientes dispositivos para pacientes podrían no estar disponibles en su mercado.

 Acon OnCall Extra Mobile

 Acon OnCall Sure Sync

 AgaMatrix WaveSense JAZZ Wireless

 Ascensia Contour Care

 Ascensia Contour Next

 Ascensia Contour Next One


 Ascensia Contour Plus One

 ForaCare FORA 6 Connect

 ForaCare FORA Diamond MINI DM30

 ForaCare FORA GD40h

 i-Sens Caresens Dual


 i-Sens NoCoding1 Plus


 i-Sens TEE2+

 Menarini Glucofix Tech

 Menarini GlucoMen areo 2K

 Menarini GlucoMen areo


 Nipro 4Sure Smart

 Nipro 4Sure SmartDuo

 NovoPen

 Roche Accu-Chek Aviva Connect

 Roche Accu-Chek Guide

 Roche Accu-Chek Instant

 Sanofi MyStar Plus

 SOOIL Dana RS

 Trividia TRUE METRIX AIR


¿No ha encontrado su dispositivo en la lista?

Carga de datos con diasend® Uploader en su Mac o PC

(última página)


Acon OnCall Extra Mobile



1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.
3. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
4. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
5. En su medidor, deje pulsadas las dos teclas con flechas hasta que se encienda la pantalla. Debe verse "bt" en la pantalla.
6. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación. Cuando se le solicite que empareje su medidor, introduzca los últimos seis dígitos del número de serie mostrado en la parte posterior del medidor.
7. A continuación, la aplicación diasend® se conectará al medidor y se iniciará la sincronización.
8. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda su medidor pulsando las dos teclas con flechas y la sincronización comenzará automáticamente.

Acon OnCall Sure Sync




1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.
3. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
4. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
5. En su medidor, mantenga pulsadas las dos teclas con flechas hasta que se encienda la pantalla. Debe verse “bt” en la pantalla.
6. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación. Cuando se le solicite que empareje su medidor, introduzca los últimos seis dígitos del número de serie mostrado en la parte posterior del medidor.
7. A continuación, la aplicación diasend® se conectará al medidor y se iniciará la sincronización.
8. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda su medidor pulsando las dos teclas con flechas, y la sincronización comenzará automáticamente.

AgaMatrix WaveSens JAZZ Wireless



1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.
3. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
4. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
5. En el medidor, mantenga pulsado el botón del medidor hasta que el icono de la función Bluetooth empiece a parpadear.
6. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación. En el medidor, se mostrará una clave de acceso de seis dígitos.

Imagen de ejemplo de una clave de acceso:

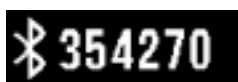

7. Introduzca el número en la aplicación.
8. El medidor indicará que el emparejamiento se ha realizado correctamente con un símbolo de verificación.


Imagen de ejemplo del símbolo de verificación:



9. El medidor y la aplicación iniciarán la sincronización.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.


Ascensia Contour Care



1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Encienda el medidor. Mantenga pulsadas ambas teclas de flecha hasta que el símbolo de Bluetooth comience a parpadear en la pantalla.
7. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación.
8. Confirme la solicitud de emparejamiento en la aplicación diasend® utilizando el código en la pantalla del medidor.
9. El medidor y la aplicación empezarán a sincronizarse.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.

Ascensia Contour Next



1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Encienda el medidor. Mantenga pulsadas ambas teclas de flecha hasta que el símbolo de Bluetooth comience a parpadear en la pantalla.
7. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación.
8. A continuación, la aplicación diasend® se conectará al medidor.
9. Confirme la solicitud de emparejamiento en la aplicación diasend® utilizando el código en la pantalla del medidor.
10. El medidor y la aplicación empezarán a sincronizarse.
11. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.

Ascensia Contour Next One




1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación diasend® Mobile.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: seleccione un método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Mantenga pulsado el **botón OK** en el medidor hasta que la luz azul del puerto de la tira de prueba empiece a parpadear. El número de serie del medidor se mostrará en la pantalla.

Imagen de ejemplo del medidor en el modo de emparejamiento:



7. En la aplicación, seleccione el número de serie de su medidor.
8. A continuación, la aplicación diasend® se conectará al medidor.
9. Confirme la solicitud de emparejamiento en la aplicación diasend®.
10. El medidor y la aplicación iniciarán la sincronización.
11. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.

Ascensia Contour Plus One




1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación diasend® Mobile.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Mantenga pulsado el **botón OK** en el medidor hasta que la luz azul del puerto de la tira de prueba empiece a parpadear. El número de serie del medidor se mostrará en la pantalla.

Imagen de ejemplo del medidor en el modo de emparejamiento:



7. En la aplicación, seleccione el número de serie de su medidor.
8. A continuación, la aplicación diasend® se conectará al medidor.
9. Confirme la solicitud de emparejamiento en la aplicación diasend®.
10. El medidor y la aplicación iniciarán la sincronización.
11. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.


ForaCare FORA 6 Connect



1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Pulse el botón de la flecha hacia arriba en el medidor para iniciar el emparejamiento Bluetooth.
7. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación.
8. De ser preciso, confirme el emparejamiento en su dispositivo móvil.
9. El medidor y la aplicación empezarán a sincronizarse.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.


ForaCare FORA Diamond MINI DM30



1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Encienda el medidor y, a continuación, vuelva a apagarlo para activar Bluetooth (la luz parpadeará en azul).
7. Seleccione el medidor en la aplicación diasend®.
8. De ser preciso, confirme la solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil.
9. El medidor y la aplicación empezarán a sincronizarse.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y, a continuación, vuelva a apagarlo para activar Bluetooth. La sincronización se iniciará automáticamente.


ForaCare FORA GD40h



1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. En el medidor, pulse el botón deslizante del lado izquierdo hacia abajo hasta que la luz azul comience a parpadear. Bluetooth ahora está activado.
7. En la aplicación diasend®, seleccione el medidor.
8. De ser preciso, confirme la solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil.
9. El medidor y la aplicación empezarán a sincronizarse.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. En el medidor, pulse el botón deslizante hacia abajo para activar Bluetooth. La sincronización se iniciará automáticamente.

i-Sens CareSens Dual




1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Para activar el emparejamiento Bluetooth en el medidor:
Mantenga pulsado el botón **S** del medidor hasta que en pantalla aparezca **SET** (Configurar). Pulse el botón de flecha hasta que **YES** (Sí) comience a parpadear. Confirme pulsando el botón **S**. En la pantalla aparecerá **bT**. Pulse el botón de flecha hasta que **Pair** (Emparejar) comience a parpadear. Confirme pulsando el botón **S**.
En la pantalla aparecerá **Pin**.
7. En la aplicación diasend®, seleccione el medidor.
8. En la pantalla del medidor aparecerá un número pin (6 dígitos). Introduzca el número pin en la aplicación diasend® para confirmar la solicitud de emparejamiento.
9. El medidor y la aplicación empezarán a sincronizarse.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente*.

* Solo cuando haya datos sin transmitir.

i-Sens NoCoding1 Plus




1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Para activar el emparejamiento Bluetooth en el medidor:
Mantenga pulsado el botón **ON/OFF** del medidor hasta que en pantalla aparezca **SET** (Configurar). Pulse el botón de flecha hasta que **YES** (SÍ) comience a parpadear. Confirme pulsando el botón **ON/OFF**. En la pantalla aparecerá **bT**. Pulse el botón de flecha hasta que **Pair** (Emparejar) comience a parpadear. Confirme pulsando el botón **ON/OFF**. En la pantalla aparecerá **Pin**.
7. En la aplicación diasend®, seleccione el medidor.
8. En la pantalla del medidor aparecerá un número pin (6 dígitos). Introduzca el número pin en la aplicación diasend® para confirmar la solicitud de emparejamiento.
9. El medidor y la aplicación empezarán a sincronizarse.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente*.

* Solo cuando haya datos sin transmitir.

i-Sens TEE2+



1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Para activar el emparejamiento Bluetooth en el medidor:
Mantenga pulsado el botón **ON/OFF** del medidor hasta que en pantalla aparezca **SET** (Configurar). Pulse el botón de flecha hasta que **YES** (Sí) comience a parpadear. Confirme pulsando el botón **ON/OFF**. En la pantalla aparecerá **bT**. Pulse el botón de flecha hasta que **Pair** (Emparejar) comience a parpadear. Confirme pulsando el botón **ON/OFF**. En la pantalla aparecerá **Pin**.
7. En la aplicación diasend®, seleccione el medidor.
8. En la pantalla del medidor aparecerá un número pin (6 dígitos). Introduzca el número pin en la aplicación diasend® para confirmar la solicitud de emparejamiento.
9. El medidor y la aplicación empezarán a sincronizarse.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente*.

* Solo cuando haya datos sin transmitir.



Menarini Glucofix Tech

(Solo para Android)



1. Asegúrese de que la función NFC esté activada tanto en su dispositivo móvil como en el medidor.
2. Apague el medidor e inicie la aplicación diasend® Mobile. Mantenga el medidor junto al chip NFC de su dispositivo móvil (normalmente, el chip NFC se encuentra en la parte posterior del dispositivo móvil).

Habilite la función NFC de su medidor siguiendo los pasos descritos a continuación:

1. Apague el medidor.
2. Mantenga pulsado el **botón de encendido/apagado** hasta que en la pantalla se muestre el texto «set».
3. Pulse el **botón Abajo** hasta que la «N» empiece a parpadear.
4. Seleccione esta función pulsando el **botón de encendido/apagado**.
5. Pulse el **botón Abajo** una vez; el texto «On» empezará a parpadear.
6. Confirme pulsando el **botón de encendido/apagado** una vez.
7. Apague el medidor.



Menarini GlucoMen areo 2K



1. Asegúrese de que la función NFC esté activada tanto en su dispositivo móvil como en el medidor.
2. Apague el medidor e inicie la aplicación diasend® Mobile. Mantenga el medidor junto al chip NFC de su dispositivo móvil (normalmente, el chip NFC se encuentra en la parte posterior del dispositivo móvil).

Tenga en cuenta lo siguiente: Para usuarios de iOS, este medidor solo es compatible a través de NFC si el medidor se ha fabricado en 2018 o más tarde.

Habilite la función NFC de su medidor siguiendo los pasos descritos a continuación:

1. Apague el medidor.
2. En función de la versión de su medidor:
Acceda al menú de ajustes manteniendo pulsado el botón **ON/OFF** o pulse simultáneamente el botón **ON/OFF** y el botón **de la flecha hacia arriba** hasta que en la pantalla aparezca «set».
3. Pulse el **botón Abajo** hasta que la «N» empiece a parpadear.
4. Seleccione esta función pulsando el **botón de encendido/apagado**.
5. Pulse el **botón Abajo** una vez; el texto «On» empezará a parpadear.
6. Confirme pulsando el **botón de encendido/apagado** una vez.
7. Apague el medidor.



Menarini GlucoMen areo

(Solo para Android)




1. Asegúrese de que la función NFC esté activada tanto en su dispositivo móvil como en el medidor.
2. Apague el medidor e inicie la aplicación diasend® Mobile. Mantenga el medidor junto al chip NFC de su dispositivo móvil (normalmente, el chip NFC se encuentra en la parte posterior del dispositivo móvil).

Habilite la función NFC de su medidor siguiendo los pasos descritos a continuación:

1. Apague el medidor.
2. Mantenga pulsado el **botón de encendido/apagado** hasta que en la pantalla se muestre el texto «set».
3. Pulse el **botón Abajo** hasta que la «N» empiece a parpadear.
4. Seleccione esta función pulsando el **botón de encendido/apagado**.
5. Pulse el **botón Abajo** una vez; el texto «On» empezará a parpadear.
6. Confirme pulsando el **botón de encendido/apagado** una vez.
7. Apague el medidor.


Nipro 4Sure Smart



1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Encienda el medidor. Bluetooth se activará automáticamente.
7. En la aplicación, seleccione el medidor.
8. De ser preciso, confirme la solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil.
9. El medidor y la aplicación empezarán a sincronizarse.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.

Nipro 4Sure SmartDuo




1. Apague el medidor.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Encienda el dispositivo. Bluetooth se activará automáticamente.
7. En la aplicación, seleccione el medidor.
8. De ser preciso, confirme la solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil.
9. El medidor y la aplicación empezarán a sincronizarse.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.




NovoPen[®] 6

NovoPen Echo[®] Plus



1. Asegúrese de que la función NFC esté activada en su dispositivo móvil.
2. Inicie la aplicación diasend[®] Mobile.
3. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: seleccione NFC como método de transferencia).
4. Mantenga el NovoPen[®] junto al chip NFC de su dispositivo móvil.

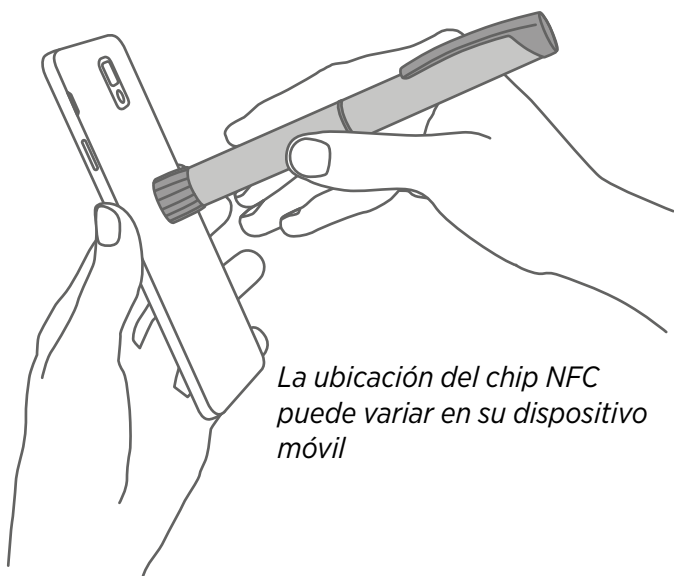

La ubicación del chip NFC puede variar en su dispositivo móvil

Roche Accu-Chek Aviva Connect




Emparejamiento del medidor


1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.

2. Encienda el medidor pulsando **OK**.


3. Seleccione **Settings** y pulse **OK**.

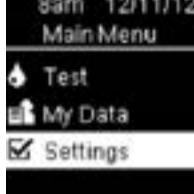


4. Desplácese hacia abajo para seleccionar **Wireless** y pulse **OK**.

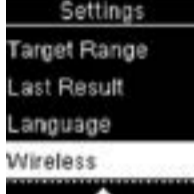

5. Seleccione **Yes** y pulse **OK**.

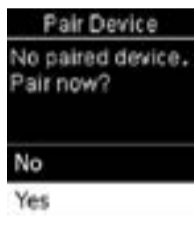

6. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

7. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).

8. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.

9. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación. Cuando se le solicite que empareje su medidor, introduzca los seis dígitos mostrados en el medidor.




Transferencia de datos

Si desea sincronizar todas las lecturas del historial del medidor, puede realizar una transferencia de datos. Esta acción enviará a diasend® todas las lecturas guardadas en su medidor.


Pulse Atrás hasta que regrese al Menú principal o encienda el medidor pulsando **OK**.

10. Inicie la aplicación diasend® Mobile.


11. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 

12. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.


13. Seleccione **My Data** y pulse **OK**.

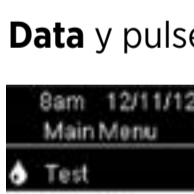

14. Seleccione **Data transfer** y pulse **OK**.

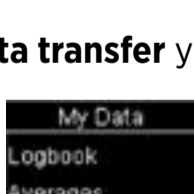

15. Seleccione **Wireless** y pulse **OK**.

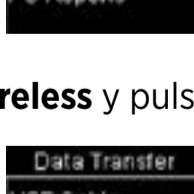


16. A continuación, el medidor y la aplicación diasend® iniciarán la sincronización.

Roche Accu-Chek Guide



Emparejamiento del medidor


1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
2. Encienda el medidor pulsando **OK**.
3. Seleccione **Settings** y pulse **OK**.

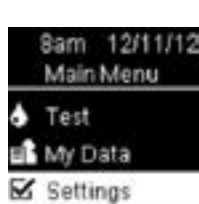


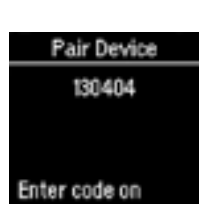
4. Desplácese hacia abajo para seleccionar **Wireless** y pulse **OK**.



5. Seleccione **Yes** y pulse **OK**.

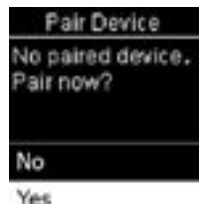


6. Inicie la aplicación diasend® Mobile.
7. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
8. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
9. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación. Cuando se le solicite que empareje su medidor, introduzca los seis dígitos mostrados en el medidor.




Transferencia de datos


Si desea sincronizar todas las lecturas del historial del medidor, puede realizar una transferencia de datos. Esta acción enviará a diasend® todas las lecturas guardadas en su medidor.

Pulse Atrás hasta que regrese al Menú principal o encienda el medidor pulsando **OK**.

10. Inicie la aplicación diasend® Mobile.
11. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
12. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
13. Seleccione **My Data** y pulse **OK**.

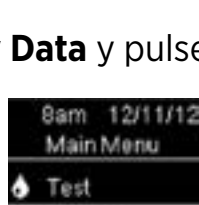

14. Seleccione **Data transfer** y pulse **OK**.

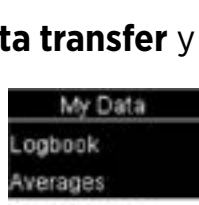

15. Seleccione **Wireless** y pulse **OK**.



16. A continuación, el medidor y la aplicación diasend® iniciarán la sincronización.

Roche Accu-Chek Instant



1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
2. Con el medidor apagado, mantenga pulsado el botón del medidor hasta que aparezca el símbolo de Bluetooth. El símbolo de emparejamiento y el símbolo inalámbrico aparecen y parpadean.




3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación. Cuando se le pida que realice el emparejamiento del medidor, introduzca los 6 dígitos del código PIN situado en la parte trasera del medidor.

Imagen de ejemplo de un código PIN:



7. A continuación, la aplicación diasend® se conectará al medidor y se iniciará la sincronización.
8. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.

Sanofi MyStar Plus




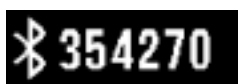
1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.
3. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
4. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
5. En el medidor, mantenga pulsado el botón del medidor hasta que el icono de la función Bluetooth empiece a parpadear.
6. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación. En el medidor, se mostrará una clave de acceso de seis dígitos.

Imagen de ejemplo de una clave de acceso:



7. Introduzca el número en la aplicación.
8. El medidor indicará que el emparejamiento se ha realizado correctamente con un símbolo de verificación.


Imagen de ejemplo del símbolo de verificación:



9. El medidor y la aplicación iniciarán la sincronización.
10. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.

SOOIL Dana RS



1. Apague la bomba.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y de que la bomba se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
3. Inicie la aplicación móvil diasend®.
4. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior. 
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
5. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
6. Enciende la bomba. Bluetooth se activará automáticamente.
7. En la aplicación, seleccione su bomba.
8. De ser preciso, confirme la solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil.
9. La bomba y la aplicación empezarán a sincronizarse.
10. Para sincronizar su bomba en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda la bomba y la sincronización se iniciará automáticamente.

Trividia TRUE METRIX AIR



1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil y que el medidor se encuentre a menos de 10 metros de distancia.
2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.
3. Busque la opción **CARGAR** en el menú inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: seleccione Bluetooth como método de transferencia).
4. Pulse **Iniciar carga** en la aplicación.
5. Encienda el medidor.
6. El símbolo de Bluetooth debería aparecer automáticamente en el medidor, lo que significa que la función Bluetooth está activada. 
7. Seleccione su medidor cuando se muestre en la aplicación (NiproBGM). Cuando se le solicite que empareje su medidor, introduzca los últimos seis dígitos del número de serie mostrado en la parte posterior del medidor.

Imagen de ejemplo del número de serie:



8. A continuación, la aplicación diasend® se conectará al medidor y se iniciará la sincronización.
9. Para sincronizar el medidor en el futuro: inicie la aplicación diasend®, busque la opción **CARGAR** y pulse **Iniciar carga**. Encienda el medidor y la sincronización se iniciará automáticamente.

Carga de datos con diasend® Uploader en su Mac o PC



1. Consiga la aplicación diasend® Uploader para Mac o PC. Puede hacerlo iniciando sesión en diasend.com y navegando hasta la pestaña Herramientas.



2. Conecte su dispositivo a su ordenador y cargue sus datos en la nube de diasend®.



3. Una vez en la nube, los datos se actualizarán de forma automática en los apartados “Resultados” e “Informes” de la aplicación móvil.